



Protocolos sugeridos AUTOLAB®



Os protocolos aqui descritos, devem ser validados com os ensaios correspondentes e seu desempenho deverá ser verificado com uma adequada planificação e execução sistemática do controle de qualidade.

Assessoria LaborLab.

Versão 1.6.13



Índice

Acido Urico	2.
Albumina	3.
Amilase	4.
Bilirrubina Direta	5.
Bilirrubina Total	6.
Calcio Arsenazo	7.
CKMB	8.
CPK	9.
Colesterol	10.
Creatinina	11.
Ferro	12.
Fosfatase Alcalina	13.
Fosforo	14.
Gama GT	15.
Glicose	16.
Lactato	17.
TGO (AST)	18.
TGP (ALT)	19.
HDL Colesterol	20.
LDH	21.
Magnésio	22.
PCR	23.
PCR Ultrasensível	24.
Proteína Total	25.
Proteína Total Urinária	26.
Triglicérides	27.
Uréia	28.



ÁCIDO URICO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Uric Acid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 2,5 a 6,0 mg/dL
M: 2,6 a 5,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Ac. Úrico</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>2,5 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>7,0 mg/dL</u>
N° de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>0.350</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>20 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>510</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>10</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>6</u>
T2	<u>N.A.</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>1</u>


ALBUMINA
AUTOLAB®
O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários
APRESENTAÇÃO
Referência Labor Lab: ALBUMIN

Código: 1770010

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Descrição	<u>Albumina</u>
Unidades	<u>g/dL</u>
V. N. Min.	<u>3,5 g/dL</u>
V. N. Max.	<u>5,5 g/dL</u>
Nº de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>0.500</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>8 g/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>620</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>3</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>1</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>240</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>



AMILASE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Amylase

Código: 1770020

Apresentação: RA: 2 x 30 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Amilase</u>
Unidades	<u>U/L</u>
V. N. Min.	<u>0,0 U/L</u>
V. N. Max.	<u>125 U/L</u>
Nº de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>2</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>0.600</u>
Subtração do Branco	<u>0</u>
Linearidade	<u>2000 U/L</u>
Controle Início C1	<u>*</u>
Controle Início C2	<u>*</u>
Controle Final C1	<u>*</u>
Controle Final C2	<u>*</u>
Filtro 1	<u>405</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>10</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>400</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	<u>*</u>
Posição do R2	<u>*</u>
Valor do Standard	<u>**</u>
Posição do Standard	<u>*</u>
Factor	<u>@</u>
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>3</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>60</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>30</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	<u>*</u>
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	<u>*</u>
Controle Pos.	<u>*</u>
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>



BILIRRUBINA DIRETA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Bilirubin D

Código: 1770030

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: até 0,4 mg/dL

Linearidade: 12 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Bili Direta</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>0,0 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>0,4 mg/dL</u>
Nº de Decimais	<u>2</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>-0.100</u>
Valor Branco Max.	<u>0.350</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>20 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>530</u>
Filtro 2	<u>620</u>
Vol. Amostra	<u>32</u>
Teste com 2 reativos	<u>Sim</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>400</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>80</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>60</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>1</u>



BILIRUBINA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Bilirubin T

Código: 1770040

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL

Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL

Até 48hs 3,4 a 11,5 mg/dL

Do 3° a 5° dia 1,5 a 12,0 mg/dL

Adultos: até 1,0 mg/dL

Linearidade: 30 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Bili Total</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>0,0 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>1,2 mg/dL</u>
N° de Decimais	<u>2</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>-0.100</u>
Valor Branco Max.	<u>0.350</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>20 mg/dL</u>
Controle Início C1	<u>*</u>
Controle Início C2	<u>*</u>
Controle Final C1	<u>*</u>
Controle Final C2	<u>*</u>
Filtro 1	<u>530</u>
Filtro 2	<u>620</u>
Vol. Amostra	<u>12</u>
Teste com 2 reativos	<u>Sim</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>400</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>80</u>
Posição do R1	<u>*</u>
Posição do R2	<u>*</u>
Valor do Standard	<u>**</u>
Posição do Standard	<u>*</u>
Factor	<u>@</u>
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>30</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	<u>*</u>
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	<u>*</u>
Controle Pos.	<u>*</u>
Consumo Substrato	<u>1</u>



CÁLCIO ARSENAZO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Cálcio
Arsenazo

Código: 1770050

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL
Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do
Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo
equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOLAB[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Cálcio</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>8,8 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>11 md/dL</u>
Nº de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>15 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>620</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>3</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>300</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>1</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>120</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>N.A</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A</u>


CK MB
AUTOLAB®
O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários
APRESENTAÇÃO
Referência Labor Lab: Ck MB

Código: 1770060

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

Controle do Kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Descrição	<u>CKMB</u>
Unidades	<u>U/L</u>
V. N. Min.	<u>0 U/L</u>
V. N. Max.	<u>24 U/L</u>
N° de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>2</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>500 U/L</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>340</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>20</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>120</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>1</u>



CPK

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: CK Nac

Código: 1770070

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: H até 195 U/L

M até 170 U/L

Linearidade: 1800 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Descrição	<u>CKNAC</u>
Unidades	<u>U/L</u>
V. N. Min.	<u>0 U/L</u>
V. N. Max.	<u>195 U/L</u>
N° de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>2</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>1.800 U/L</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>340</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>20</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>60</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>1</u>



COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Colesterol
COD-PAD Liquid Stable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: < 200 mg/dL
Limiar elevado 200-239 mg/dL
Elevado: 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Colesterol</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>0,0 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>200 md/dL</u>
N° de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>0.300</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>500mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>510</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>5</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>



CREATININA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Creatinine

Código: 1770100

Apresentação: RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto Homem 0,70 a 1,20 mg/dL

Adulto Mulher 0,53 a 1,00 mg/dL

Linearidade: 9,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Creatinina</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>0,70 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>1,20 md/dL</u>
N° de Decimais	<u>2</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>3</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>15 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>510</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>40</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>400</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>1</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>60</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>30</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>


FERRO
AUTOLAB®
O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários
APRESENTAÇÃO
Referência Labor Lab: Iron

Código: 1770180

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: M 65 – 175 ug/dL

H 60 – 170 ug/dL

Linearidade: 1000 ug/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Descrição	<u>Ferro</u>
Unidades	<u>ug/dL</u>
V. N. Min.	<u>65 ug/dL</u>
V. N. Max.	<u>170 ug/dL</u>
Nº de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>0.100</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>500 ug/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>580</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>80</u>
Teste com 2 reativos	<u>Sim</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>400</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>80</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>



FOSFATASE ALCALINA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Alkaline Phosphatase

Código: 1770110

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Preparar Reativo de Trabalho. Misturar 4 partes do RA com 1 parte do RB.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L

Adultos: 65 a 300 U/L

Linearidade: 1500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>ALP</u>
Unidades	<u>U/L</u>
V. N. Min.	<u>27 U/L</u>
V. N. Max.	<u>100 U/L</u>
N° de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>2</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>1.500 U/L</u>
Controle Início C1	<u>*</u>
Controle Início C2	<u>*</u>
Controle Final C1	<u>*</u>
Controle Final C2	<u>*</u>
Filtro 1	<u>405</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>5</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	<u>*</u>
Posição do R2	<u>*</u>
Valor do Standard	<u>**</u>
Posição do Standard	<u>*</u>
Factor	<u>@</u>
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>3</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>40</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>30</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	<u>*</u>
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	<u>*</u>
Controle Pos.	<u>*</u>
Consumo Substrato	<u>1</u>


FOSFORO
AUTOLAB®
O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários
APRESENTAÇÃO
Referência Labor Lab: Phosphorus

Código: 1770250

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Descrição	<u>Fósforo</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>2,5 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>4,8 mg/dL</u>
Nº de Decimais	<u>2</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>0.800</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>16 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>340</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>5</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>3</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>360</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>6</u>
T2	<u>N.A.</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>


GAMA GT
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Gama
Glutamil Transferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L
H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>GGT</u>
Unidades	<u>U/L</u>
V. N. Min.	<u>11 U/L</u>
V. N. Max.	<u>50 U/L</u>
Nº de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>2</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.100</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>1.200 U/L</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>405</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>50</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>90</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>30</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>1</u>



GLICOSE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Glicose
GOD PAP Liquid Stable.

Código: 1770130

Apresentação: RA: 2 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

0 a 1 dia:	50 a 80 mg/dL
Neonatos:	40 a 60 mg/dL
Crianças:	60 a 100 mg/dL
Adulto:	74 a 106 mg/dL
Urina isolada:	1 a 15mg/dL
Urina 24horas:	<0,5 g/24hs
LCR:	Crianças 60 a 80 mg/dL Adultos 40 a 70 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Glicose</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>74 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>106 md/dL</u>
N° de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>0.300</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>500mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>510</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>5</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>



LACTATO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Lactate

Código: 1770200

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 4,5 a 19,8 mg/dL

Linearidade: 130 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Lactato</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>4,5 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>19,8 mg/dL</u>
Nº de Decimais	<u>2</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>-0.100</u>
Valor Branco Max.	<u>3.350</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>130 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>530</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>4</u>
Teste com 2 reativos	<u>Sim</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>300</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>60</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>120</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>1</u>


TGO (AST)
AUTOLAB®
O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L

H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Descrição	<u>TGO</u>
Unidades	<u>U/L</u>
V. N. Min.	<u>11 U/L</u>
V. N. Max.	<u>39 U/L</u>
Nº de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>2</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.100</u>
Valor Branco Max.	<u>2.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>600 U/L</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>340</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>50</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>4</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>60</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>6</u>
T2	<u>40</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>0</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>0.800</u>


TGP (ALT)
AUTOLAB®
O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L

H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Descrição	<u>TGP</u>
Unidades	<u>U/L</u>
V. N. Min.	<u>11 U/L</u>
V. N. Max.	<u>45 U/L</u>
Nº de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>2</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.100</u>
Valor Branco Max.	<u>2.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>600 U/L</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>340</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>50</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>4</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>60</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>6</u>
T2	<u>40</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>0</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>0.800</u>



HDL COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: HDL
Colesterol Direto.

Código: 1770160

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Próprio do Kit

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Baixo: < 40 mg/dL
Elevado (desejado): 60 mg/dL

Linearidade: 200 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>HDL</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>0 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>60 md/dL</u>
Nº de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>200mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>590</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>3</u>
Teste com 2 reativos	<u>Sim</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>300</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>100</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>3</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>500</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>


LDH
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: LDH-P
Liquid Stable

Código: 1770210

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

Linearidade: 1000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>LDH</u>
Unidades	<u>U/L</u>
V. N. Min.	<u>80 U/L</u>
V. N. Max.	<u>240 U/L</u>
N° de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>2</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.100</u>
Valor Branco Max.	<u>2.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>1000 U/L</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>340</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>10</u>
Teste com 2 reativos	<u>Sim</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>400</u>
Vol. Do R2 (ul)	
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>4</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>40</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>30</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>0</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>0.800</u>



MAGNÉSIO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Magnesium

Código: 1770220

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOLAB[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Magnésio</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>1,9 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>2,5 md/dL</u>
N° de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>2.5 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>510</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>5</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>180</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>


PCR
AUTOLAB®
O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários
APRESENTAÇÃO
Referência Labor Lab: CRP

Código: 1770240

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Descrição	<u>PCR</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>0,0 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>0,5 md/dL</u>
Nº de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>3</u>
Nº de Brancos	<u>0</u>
Valor Branco Min.	<u>N.A.</u>
Valor Branco Max.	<u>N.A.</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>20 mg/dL</u>
Controle Início C1	<u>*</u>
Controle Início C2	<u>*</u>
Controle Final C1	<u>*</u>
Controle Final C2	<u>*</u>
Filtro 1	<u>340</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>20</u>
Teste com 2 reativos	<u>SIM</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>250</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>50</u>
Posição do R1	<u>*</u>
Posição do R2	<u>*</u>
Valor do Standard	<u>**</u>
Posição do Standard	<u>*</u>
Factor	<u>@</u>
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>1</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>300</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>30</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	<u>*</u>
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	<u>*</u>
Controle Pos.	<u>*</u>
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>


PCR ULTRASENSÍVEL
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: HS PCR

Código: 1770170

Apresentação: RA: 1 x 20 mL
RB: 1 X 20 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>PCR HS</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>0,0 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>0,5 md/dL</u>
Nº de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>3</u>
Nº de Brancos	<u>0</u>
Valor Branco Min.	<u>N.A.</u>
Valor Branco Max.	<u>N.A.</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>20 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>570</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>6</u>
Teste com 2 reativos	<u>SIM</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>150</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>150</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>1</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>200</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>30</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>


PROTEÍNA TOTAL
AUTOLAB®
O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários
APRESENTAÇÃO
Referência Labor Lab: Protal

Código: 1770260

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Descrição	<u>Proteína Total</u>
Unidades	<u>g/dL</u>
V. N. Min.	<u>6,0 g/dL</u>
V. N. Max.	<u>8,0 g/dL</u>
Nº de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>12 g/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>540</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>5</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>



PROTEÍNA URINÁRIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Prot U/LCR

Código:

Apresentação: RA: 4 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Urina ou LCR.

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 1 a 15 mg/dL
U. 24 horas: 28 a 141 mg/24 horas

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Prot U/LCR</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>1,0 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>15,0 mg/dL</u>
N° de Decimais	<u>1</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
N° de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>1.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>300 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>620</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>10</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
N° de Lavados	<u>2</u>
N° de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>



TRIGLICÉRIDES

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Triglicérides
GOD PAP Líquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: <150 mg/dL
Limiar alto: 150-199 mg/dL
Elevado: 200-499 mg/dL
Muito elevado: > 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Triglicérides</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>0 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>150 mg/dL</u>
Nº de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>1</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.000</u>
Valor Branco Max.	<u>0.250</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>1500 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>510</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>5</u>
Teste com 2 reativos	<u>Não</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	<u>N.A.</u>
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>300</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>N.A.</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>1</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>N.A.</u>



URÉIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Uréia UV
Liquid Stable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 a 43 mg/dL
Urina: 26 a 43 g/24hs

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

AUTOLAB®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Descrição	<u>Uréia</u>
Unidades	<u>mg/dL</u>
V. N. Min.	<u>15 mg/dL</u>
V. N. Max.	<u>45 mg/dL</u>
Nº de Decimais	<u>0</u>
Modelo	<u>0</u>
Tipo	<u>2</u>
Nº de Brancos	<u>1</u>
Valor Branco Min.	<u>0.100</u>
Valor Branco Max.	<u>2.000</u>
Subtração do Branco	<u>1</u>
Linearidade	<u>300 mg/dL</u>
Controle Início C1	*
Controle Início C2	*
Controle Final C1	*
Controle Final C2	*
Filtro 1	<u>340</u>
Filtro 2	<u>N.A.</u>
Vol. Amostra	<u>5</u>
Teste com 2 reativos	<u>Sim</u>
Vol. Do R1 (ul)	<u>500</u>
Vol. Do R2 (ul)	
Posição do R1	*
Posição do R2	*
Valor do Standard	**
Posição do Standard	*
Factor	@
Memorizar Factor novo	<u>1</u>
Relação de Diluição 1:	<u>2</u>
Tempo de incubação (seg)	<u>60</u>
Tempo de agregação R2	<u>N.A.</u>
T1	<u>12</u>
T2	<u>30</u>
Nº de Lavados	<u>2</u>
Nº de Lavados entre amostra	<u>2</u>
Vol. De Solução de Lavado	<u>500</u>
Grupo de Pré-diluição	<u>1</u>
Posição de relatório	*
Direção: POS 0: Neg	<u>0</u>
Controle Neg.	*
Controle Pos.	*
Consumo Substrato	<u>1</u>