



Protocolos sugeridos TP Analyser®



Assessoria LaborLab.

Versão 1.6.13

Os protocolos aqui descritos, devem ser validados com os ensaios correspondentes e seu desempenho deverá ser verificado com uma adequada planificação e execução sistemática do controle de qualidade.



Índice

Acido Urico	2.
Albumina	3.
Amilase	4.
Calcio Arsenazo	5.
CKMB	6.
CPK	7.
Colesterol	8.
Creatinina	9.
Ferro	10.
Fosfatase Alcalina	11.
Fosforo	12.
Gama GT	13.
Glicose	14.
TGO (AST)	15.
TGP (ALT)	16.
LDH	17.
Magnésio	18.
PCR	19.
PCR Ultrasensível	20.
Proteína Total	21.
Proteína Total Urinária	22.
Triglicérides	23.
Uréia	24.



ÁCIDO URICO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Uric Acid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 2,5 a 6,0 mg/dL
M: 2,6 a 5,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>mg/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>500</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>20</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Ác. Urico</u>
Linear.....	<u>0-20</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



ALBUMINA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: ALBUMIN

Código: 1770010

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>g/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>620</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>10</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>2500</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Albumina</u>
Linear.....	<u>0-8</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



AMILASE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Amylase

Código: 1770020

Apresentação: RA: 2 x 30 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>Kinetics</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>405</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>NO</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>60</u>
Test Time (s).....	<u>180</u>
Sample Volume (µl).....	<u>20</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Amylase</u>
Linear.....	<u>0-2000</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



CÁLCIO ARSENAZO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Cálcio
Arsenazo

Código: 1770050

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL

Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>g/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>620</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>10</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Cálcio</u>
Linear.....	<u>0 - 15</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>


CK MB
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Ck MB

Código: 1770060

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

Controle do Kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>Kinetics</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>340</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>NO</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>600</u>
Test Time.....	<u>300</u>
Sample Volume (µl).....	<u>40</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>CKMB</u>
Linear.....	<u>0-500</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



CPK

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: CK Nac

Código: 1770070

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: H até 195 U/L

M até 170 U/L

Linearidade: 1800 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Geral

Teste Parâmetros	<u>Kinetics</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>340</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>NO</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>180</u>
Test Time.....	<u>300</u>
Sample Volume (µl).....	<u>40</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	*
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>CKNAC</u>
Linear.....	<u>0-1800</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	**



COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Colesterol
COD-PAD Liquid Stable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: < 200 mg/dL
Limiar elevado 200-239 mg/dL
Elevado: 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>g/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>500</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>10</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Colesterol</u>
Linear.....	<u>0 - 500</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



CREATININA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Creatinine

Código: 1770100

Apresentação: RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto Homem 0,70 a 1,20 mg/dL
Adulto Mulher 0,53 a 1,00 mg/dL

Linearidade: 9,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Labmax Pleno®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>Two Point</u>
Unit	<u>mg/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>500</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>30</u>
Test Time (s).....	<u>60</u>
Sample Volume (µl).....	<u>20</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1200</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	*
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Creatinina</u>
Linear.....	<u>0 - 40</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	**


FERRO
APRESENTAÇÃO
Referência Labor Lab: Iron

Código: 1770180

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

 RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

 Adulto: M 65 – 175 ug/dL
H 60 – 170 ug/dL

Linearidade: 1000 ug/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>ug/dL</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>546</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>200</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Ferro</u>
Linear.....	<u>0 - 500</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



FOSFATASE ALCALINA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Alkaline Phosphatase

Código: 1770110

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Preparar Reativo de Trabalho. Misturar 4 partes do RA com 1 parte do RB.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L

Adultos: 65 a 300 U/L

Linearidade: 1500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros.....	<u>Kinetics</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>405</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>NO</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>60</u>
Test Time.....	<u>180</u>
Sample Volume (µl).....	<u>10</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>ALP</u>
Linear.....	<u>0-1500</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



FOSFORO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Phosphorus

Código: 1770250

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros.....	<u>End Point</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>340</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>10</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Fósforo</u>
Linear.....	<u>0 - 12</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>


GAMA GT
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Gama
Glutamil Transferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L
H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros.....	<u>Kinetics</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>405</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>NO</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>60</u>
Test Time.....	<u>180</u>
Sample Volume (µl).....	<u>100</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>GGT</u>
Linear.....	<u>0-1200</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



GLICOSE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Glicose
GOD PAP Liquid Stable.

Código: 1770130

Apresentação: RA: 2 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

0 a 1 dia: 50 a 80 mg/dL
 Neonatos: 40 a 60 mg/dL
 Crianças: 60 a 100 mg/dL
 Adulto: 74 a 106 mg/dL
 Urina isolada: 1 a 15mg/dL
 Urina 24horas: <0,5 g/24hs
 LCR: Crianças 60 a 80 mg/dL
 Adultos 40 a 70 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>g/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>500</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>10</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Glicose</u>
Linear.....	<u>0 - 500</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>


TGO (AST)
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L

H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros.....	<u>Kinetics</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>340</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>NO</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>90</u>
Test Time.....	<u>180</u>
Sample Volume (µl).....	<u>100</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>TGO/AST</u>
Linear.....	<u>0-600</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>


TGP (ALT)
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L

H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros.....	<u>Kinetics</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>340</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>NO</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>90</u>
Test Time.....	<u>180</u>
Sample Volume (µl).....	<u>100</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>TGP/ALT</u>
Linear.....	<u>0-600</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>


LDH
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: LDH-P
Liquid Stable

Código: 1770210

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

Linearidade: 1000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros.....	<u>Kinetics</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>340</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>NO</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>30</u>
Test Time.....	<u>180</u>
Sample Volume (µl).....	<u>20</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>LPH-P</u>
Linear.....	<u>0-1000</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



MAGNÉSIO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Magnesium

Código: 1770220

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>mg/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>500</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>10</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Magnésio</u>
Linear.....	<u>0 – 2,5</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>


PCR
TP Analyzer®
O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários
APRESENTAÇÃO
Referência Labor Lab: CRP

Código: 1770240

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Geral

Teste Parâmetros	<u>Multipoints</u>
Unit	<u>mg/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>340</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>300</u>
Test Time (s).....	<u>300</u>
Sample Volume (µl).....	<u>80</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1200</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Não Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>PCR Turb</u>
Linear.....	<u>0 - 0,5</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Não Linear</u>
Num of STD.....	<u>6</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>


PCR ULTRASENSÍVEL
APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: HS PCR

Código: 1770170

Apresentação: RA: 1 x 20 mL
RB: 1 X 20 mL

NOTAS
Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>Multipoints</u>
Unit	<u>mg/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>546</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>300</u>
Test Time (s).....	<u>300</u>
Sample Volume (µl).....	<u>18</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>900</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Não Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>PCR Turb</u>
Linear.....	<u>0 – 0,5</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Não Linear</u>
Num of STD.....	<u>6</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



PROTEÍNA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Protal

Código: 1770260

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>g/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>546</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>10</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Proteína Total</u>
Linear.....	<u>0-12</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



PROTEÍNA URINÁRIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Prot U/LCR

Código:

Apresentação: RA: 4 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Urina ou LCR.

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 1 a 15 mg/dL
U. 24 horas: 28 a 141 mg/24 horas

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>mg/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>620</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>20</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Prot. Urinária</u>
Linear.....	<u>0-300</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



TRIGLICÉRIDES

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Triglicérides
GOD PAP Liquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: <150 mg/dL
Limiar alto: 150-199 mg/dL
Elevado: 200-499 mg/dL
Muito elevado: > 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros	<u>End Point</u>
Unit	<u>g/dl</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength.....	<u>500</u>
Sub Wavelength.....	<u>NO</u>
Blank.....	<u>Reagent</u>
Reagent Blak.....	<u>0</u>
Delay Time (s).....	<u>3</u>
Sample Volume (µl).....	<u>10</u>
Reagente Volume (µl).....	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl).....	<u>500</u>
Calibration.....	<u>Linear</u>
Norms.....	<u>*</u>
Factor.....	<u>0</u>
Name.....	<u>Triglicérides</u>
Linear.....	<u>0-1500</u>

Parâmetros de Calibração

Mode.....	<u>Linear</u>
Num of STD.....	<u>1</u>
Num Repeat.....	<u>1</u>
Concentration.....	<u>**</u>



URÉIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Uréia UV
Liquid Stable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 a 43 mg/dL
Urina: 26 a 43 g/24hs

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TP Analyzer®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Teste Parâmetros.....	<u>Kinetics</u>
Unit	<u>U/L</u>
Temperature.....	<u>37°C</u>
Main Wavelength	<u>340</u>
Sub Wavelength	<u>NO</u>
Blank	<u>NO</u>
Reagent Blak	<u>0</u>
Delay Time (s)	<u>30</u>
Test Time	<u>90</u>
Sample Volume (µl)	<u>10</u>
Reagente Volume (µl)	<u>1000</u>
Aspirate Vol (µl)	<u>500</u>
Calibration	<u>Linear</u>
Norms	*
Factor	<u>0</u>
Name	<u>Uréia</u>
Linear	<u>0-300</u>

Parâmetros de Calibração

Mode	<u>Linear</u>
Num of STD	<u>1</u>
Num Repeat	<u>1</u>
Concentration	**