

Protocolos sugeridos BTS 310[®]





Índice

Acido Urico	2.
Albumina	3.
Amilase	4.
Bilirrubina Direta	5.
Bilirrubina Total	6.
Calcio Arsenazo	7.
CKMB	8.
CPK	9.
Colesterol	10.
Creatinina	11.
Ferro	12.
Fosfatase Alcalina	13.
Fosforo	14.
Gama GT	15.
Glicose	16.
Lactato	17.
TGO (AST)	18.
TGP (ALT)	19.
LDH	20.
Magnésio	21.
Proteína Total	22.
Proteína Total Urinária	23.
Triglicérides	24.
Uréia	25.

**ÁCIDO ÚRICO****APRESENTAÇÃO**

Referência Laborlab: Uric Acid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 3,5 a 7,2 mg/dL

M: 2,6 a 6,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

Parâmetro definido pelo usuário

N.A. - Não se Aplica.

BTS 310®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

NOME:.....Ácido Úrico
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....505 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**



ALBUMINA

BTS 310®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Albumin

Código: 1770010

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (g/dL)

Parâmetro definido pelo usuário

N.A.- Não se Aplica.

NOME:.....Albumina
UNIDADES:.....g/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....625 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**AMILASE****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Amylase**Código:** 1770020**Apresentação:** RA: 2 x 30 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma heparinizado ou urina

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....Albumina
UNIDADES:.....g/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....625 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**BILIRRUBINA DIRETA****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Bilirubin D**Código:** 1770030**Apresentação:** RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: até 0,2 mg/dL

Linearidade: 12 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

Paramento definido pelo usuário.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....Bilirrubina Direta
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Modo diferencial com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....546 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**BILIRUBINA TOTAL****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Bilirubin T**Código:** 1770040**Apresentação:** RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.**Instruções de Uso:**

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL
Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL
Até 48hs 3,4 a 11,5 mg/dL
Do 3° a 5° dia 1,5 a 12,0 mg/dL
Adultos: até 1,0 mg/dL**Linearidade:** 30 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A.- Não se Aplica.

NOME:.....Bilirrubina Total
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Modo diferencial com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....546 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**CÁLCIO ARSENAZO****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Cálcio Arsenazo**Código:** 1770050**Apresentação:** RA: 2 x 50 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL

Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

Paramento definido pelo usuário.

N.A.- Não se Aplica.

NOME:.....Cálcio Arsenazo
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....620 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**



CK MB

BTS 310®

*O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** CK MB**Código:** 1770060**Apresentação:** RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.**Instruções de Uso:**

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Controle do kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (U/L)

Paramento definido pelo usuário.

N.A.- Não se Aplica.

NOME:.....CK MB
UNIDADES:.....U/L
MODO DE ANÁLISE:.....Tempo fixo com fator
FATOR:.....8254
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....340 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE INCUBAÇÃO:.....300
TEMPO DE INTERVALO:.....300
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Fator
TEMPERATURA:.....37°C



CPK

BTS 310®

*O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** CK Nac**Código:** 1770070**Apresentação:** RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.**Instruções de Uso:**

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:Adultos: H até 195 U/L
M até 170 U/L**Linearidade:** 1800 U/L**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A.- Não se Aplica.

NOME:.....CK Nac
UNIDADES:.....U/L
MODO DE ANÁLISE:.....Cinética delta com fator
FATOR:.....4127
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....340 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE INCUBAÇÃO:.....180
TEMPO DE INTERVALOS:.....60
NÚMERO DE INTERVALOS:.....3
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Fator
TEMPERATURA:.....37°C

**COLESTEROL****APRESENTAÇÃO**

Referência Laborlab: Colesterol
COD-PAD Liquid Stable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: < 200 mg/dL

Limiar elevado: 200-239 mg/dL

Elevado: 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A. - Não se Aplica.

BTS 310®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

NOME:.....Colesterol
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....505 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**CREATININA****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Creatinine**Código:** 1770100**Apresentação:** RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.**Instruções de Uso:**

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:Adultos H: 0,7 a 1,3 mg/dL
M: 0,6 a 1,1 mg/dL**Linearidade:** 9,0 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A.- Não se Aplica.

NOME:.....Creatinina
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Tempo fixo com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....505 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE INCUBAÇÃO:.....30
TEMPO DE INTERVALO:.....90
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....37°C
PADRÃO:.....**

**FERRO****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Iron**Código:** 1770180**Apresentação:** RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: M 50 – 170 ug/dL

H 65 – 175 ug/dL

Linearidade: 1500 ug/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (ug/dL)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....Ferro
UNIDADES:.....µg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Modo diferencial com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....600 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**FOSFATASE ALCALINA****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Alkaline Phosphatase**Código:** 1770110**Apresentação:** RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.**Instruções de Uso:**

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:Crianças: até 645 U/L
Adultos: 65 a 300 U/L**Linearidade:** 1500 U/L**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....Fosfatase alcalina
UNIDADES:.....U/L
MODO DE ANÁLISE:.....Cinética delta com fator
FATOR:.....5460
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....405 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE INCUBAÇÃO:.....60
TEMPO DE INTERVALOS:.....60
NÚMERO DE INTERVALOS:.....3
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Fator
TEMPERATURA:.....37°C

**FÓSFORO****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Phosphorus**Código:** 1770250**Apresentação:** RA: 1 x 100 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....Fósforo
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....340 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**GAMA GT****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO**

Referência Laborab: Gama
Glutamil Transferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L
H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....Gama GT
UNIDADES:.....U/L
MODO DE ANÁLISE:.....Cinética delta com fator
FATOR:.....1158
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....405 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE INCUBAÇÃO:.....60
TEMPO DE INTERVALOS:.....60
NÚMERO DE INTERVALOS:.....3
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Fator
TEMPERATURA:.....37°C

**GLICOSE****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Glicose
GOD PAP Liquid Stable.**Código:** 1770130**Apresentação:** RA: 2 x 250 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma, urina ou líquido cefalorraquidiano (LCR).

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:0 a 1 dia: 50 a 80 mg/dL
Neonatos: 40 a 60 mg/dL
Crianças: 60 a 100 mg/dL
Adulto: 74 a 106 mg/dL
Urina isolada: 1 a 15mg/dL
Urina 24horas: <0,5 g/24hs
LCR: Crianças 60 a 80 mg/dL
Adultos 40 a 70 mg/dL**Linearidade:** 500 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....Glicose
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....505 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**LACTATO****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Lactate**Código:** 1770200**Apresentação:** RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 12 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.**Instruções de Uso:**

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Plasma ou Líquido cefalorraquidiano (LCR)

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:Sangue venoso: 4,5 a 19,8 mg/dL
Sangue arterial: < 11,3 mg/dL
LCR adulto: 10 a 25 mg/dL**Linearidade:** 130 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A.- Não se Aplica.

NOME:.....Lactato
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....546 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**TGO (AST)****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO**

Referência Laborlab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L
H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....TGO
UNIDADES:.....U/L
MODO DE ANÁLISE:.....Cinética delta com fator
FATOR:.....1746
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....340 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE INCUBAÇÃO:.....60
TEMPO DE INTERVALOS:.....60
NÚMERO DE INTERVALOS:.....3
TIPO DE REAÇÃO:.....Decrescente
CALIBRAÇÃO:.....Fator
TEMPERATURA:.....37°C

**TGP (ALT)****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO**

Referência Laborlab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L
H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....TGP
UNIDADES:.....U/L
MODO DE ANÁLISE:.....Cinética delta com fator
FATOR:.....1746
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....405 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE INCUBAÇÃO:.....60
TEMPO DE INTERVALOS:.....60
NÚMERO DE INTERVALOS:.....3
TIPO DE REAÇÃO:.....Decrescente
CALIBRAÇÃO:.....Fator
TEMPERATURA:.....37°C

**MAGNÉSIO****APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Magnesium**Código:** 1770220**Apresentação:** RA: 2 x 50 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro, plasma heparinizado ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs: 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A.- Não se Aplica.

BTS 310®*O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários*

NOME:.....Magnésio
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....505 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**PROTEÍNA TOTAL****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Protal**Código:** 1770260**Apresentação:** RA: 1 x 250 m**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 g/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (g/dL)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....Proteína Total
UNIDADES:.....g/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....546 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**PROTEÍNA URINÁRIA****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Prot U/LCR**Código:** 1770350**Apresentação:** RA: 1 x 100 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Urina ou LCR.

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 1 a 25 mg/dL

U. 24 horas: 30 a 140 mg/24 horas

Linearidade: 300 mg/dL

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A.- Não se Aplica.

NOME:.....PTU
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....620 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**TRIGLICÉRIDES****APRESENTAÇÃO**

Referência LaborLab: Triglicérides
GOD PAP Líquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do uit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: <150 mg/dL

Limiar alto: 150-199 mg/dL

Elevado: 200-499 mg/dL

Muito elevado: ≥ 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

Parâmetro definido pelo usuário.

N.A. - Não se Aplica.

BTS 310®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

NOME:.....Triglicérides
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Ponto final com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....505 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO:.....5
TIPO DE REAÇÃO:.....Crescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....25°C
PADRÃO:.....**

**URÉIA****BTS 310®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO**

Referência Laborlab: Uréia UV
Liquid Stable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 a 43 mg/dL
Urina: 26 a 43 g/24hs

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

NOME:.....Uréia UV
UNIDADES:.....mg/dL
MODO DE ANÁLISE:.....Tempo fixo com padrão
MODO DE LEITURA:.....Monocromática
FILTRO DE LEITURA:.....340 nm
VOLUME DE ASPIRAÇÃO:.....500 µL
TEMPO DE INCUBAÇÃO:.....30
TEMPO DE INTERVALO:.....60
TIPO DE REAÇÃO:.....Decrescente
CALIBRAÇÃO:.....Calibrador
TEMPERATURA:.....37°C
PADRÃO:.....**