



Protein U/CSF

Control

Finalidade

Para controle de precisão

Aplicações

Para estudo de precisão intralaboratorial e de exatidão na determinação de proteínas em urina e líquido cefalorraquidiano utilizando o kit de **Protein U/CSF** da Laborlab.

Reagentes fornecidos

Controle Nível 1: solução contendo níveis de albumina entre 25-75 mg/dL. Os valores são variáveis lote a lote.

Controle Nível 2: solução contendo níveis de albumina entre 70-190 mg/dL. Os valores são variáveis lote a lote.

Precauções

Os Reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".

Os Controles foram testados para antígeno de superfície de hepatite B (HBsAg), vírus da hepatite C (HCV) e anticorpos contra HIV 1/2, encontrando-se inativos. No entanto, devem ser utilizados como se tratando de material infectante.

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas conforme à regulação local vigente.

Instruções de uso

Reagentes Fornecidos: prontos para uso.

Estabilidade e instruções de armazenamento

Reagentes Fornecidos: são estáveis sob refrigeração (2-10°C) até a data de vencimento indicada na embalagem.

Indícios de instabilidade ou deterioração dos reagentes

Qualquer variação nos caracteres organolépticos dos controles pode ser indício de deterioração dos mesmos.

Material necessário (não fornecido)

Vide a bula de **Protein U/CSF** da Laborlab.

Procedimento

Deve ser utilizado do mesmo modo que uma amostra desconhecida, de acordo com as instruções que acompanham ao kit de Protein U/CSF da Laborlab.

Limitações do procedimento

Vide a bula de **Protein U/CSF** da Laborlab.

Apresentação

- 2 x 3 ml (Cód. 1770360).

Termo de garantia

Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio deste kit, assim como em sua conservação.

SÍMBOLOS



Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Uso médico-diagnóstico "in vitro"



Conteúdo suficiente para <n> testes



Data de validade



Limite de temperatura (conservar a)



Não congelar



Risco biológico



Volume após a reconstituição



Conteúdo



Número de lote



Elaborado por:



Nocivo



Corrosivo / Caústico



Irritante



Consultar as instruções de uso



Calibrador



Controle



Controle Positivo



Controle Negativo



Número de catálogo



Produtos para Laboratórios Ltda.
Estrada do Capão Bonito, 489
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07263-010
CNPJ: 72.807.043/0001-94
Atendimento ao cliente:
+55 (11) 2480 0529/+55 (11) 2499 1277
sac@laborlab.com.br
www.laborlab.com.br