



# Protein Calibrator

Lote: 1502158510 Val.: 11/06/2016

#### Finalidade

Para a calibração de métodos imunoturbidimétricos.

#### Aplicações

O **Protein Calibrator** foi desenvolvido para ser utilizado com os reagentes turbidimétricos da Laborlab. Consultar a tabela anexa para valores estabelecidos para os constituintes, visto os mesmos são lote específicos.

#### Reagentes fornecidos

**Calibrador:** soro inativo com conservantes apropriados.

#### Instruções de uso

**Calibrador:** pronto para uso.

#### Precauções

O reagente é para uso diagnóstico "in vitro".

Evitar a ingestão e contato com a pele.

O calibrador foi preparado partindo de material não reagente para HBsAg e HIV. No entanto, devem ser manipulados como se tratando de material infectante.

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação local vigente.

#### Estabilidade e instruções de armazenamento

**Calibrador:** estável sob refrigeração (2-10°C) até a data do vencimento indicada na embalagem. Não congelar.

Uma vez aberta a embalagem é estável por 30 dias sob refrigeração (2-10°C). Não congelar.

#### Apresentação

- 1 x 1 ml (Cód. 1770620)

VALORES ESTABELECIDOS			
PROTEÍNA	MÉTODO	VALOR	
		(mg/dl)	(g/l)
α1-Glicoproteína	a1-Acid Glycoprotein (AGP)	208	2,08
Componente C3	C3	406	4,06
Componente C4	C4	70,7	0,71
Imunoglobulina A	IgA	510	5,10
Imunoglobulina G	IgG	2700	27,0
Imunoglobulina M	IgM	220	2,20
Transferrina	Transferrin	760	7,60

## SÍMBOLOS



Este produto preenche os requisitos da Diretiva Européia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"

Representante autorizado na Comunidade Européia

Uso médico-diagnóstico "in vitro"

Conteúdo suficiente para <n> testes

Data de validade

Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

Risco biológico

Volume após da reconstituição

Conteúdo

Número de lote

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controle

Controle Positivo

Controle Negativo

Número de catálogo

### **Termo de garantia**

*Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio deste kit, assim como em sua conservação.*



Produtos para Laboratórios Ltda.  
Estrada do Capão Bonito, 489  
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07263-010  
CNPJ: 72.807.043/0001-94  
Atendimento ao cliente:  
+55 (11) 2480 0529/+55 (11) 2499 1277  
sac@laborlab.com.br  
www.laborlab.com.br