



Immunology Control

Level 1

Lote: 1507170490 Venc.: 30/04/2017

Finalidade

Para o controle da precisão nos métodos imunoturbidimétricos

Aplicações

Immunology Control level 1 foi desenvolvido para ser utilizado na precisão de reagentes turbidimétricos. Consultar a tabela anexa para valores estabelecidos para os constituintes, visto que os mesmos variam de acordo com o lote.

Reagentes fornecidos

Control level 1: soro humano inativado com conservadores apropriados.

Instruções de uso

O Reagente Fornecido é pronto para uso.

Precauções

O reagente é para uso diagnóstico "in vitro".

Evitar a ingestão e contato com a pele.

O Controle foi preparado a partir de material não reativo para HBsAg, HCV e HIV. No entanto, devem ser manipulados como tratando-se de amostras infectantes.

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação local vigente.

Estabilidade e instruções de armazenamento

Reagente Fornecido: estável sob refrigeração (2-10°C) até a data do vencimento indicada na embalagem.

Uma vez aberta a embalagem é estável por 45 dias sob refrigeração (2-10°C).

Apresentação

- 1 x 1 mL (Cód. 1770320).

VALORES ESTABELECIDOS

ANALITO	UNIDADE	KIT	VALOR MÉDIO	FAIXA	
α 1-Glicoproteína ácida	mg/dL	α 1-Acid Glyoprotein (AGP)	41,4	33,1	49,7
Antiestreptolisina O	UI/mL	Anti-Streptolysin O (ASO)	146	116	175
Componente C3	mg/dL	C3	74,7	59,8	89,6
Componente C4	mg/dL	C4	15,9	12,7	19,1
Fator reumatóide	UI/mL	Rheumatoid Factor (RF)	53,6	42,9	64,3
Imunoglobulina A	mg/dL	IgA	117	94	140
Imunoglobulina G	mg/dL	IgG	574	459	688
Imunoglobulina M	mg/dL	IgM	83	66	99
Proteína C reativa	mg/L	CRP	15,3	12,2	18,4
	mg/L	hs CRP	13,4	10,7	16,1
Transferrina	mg/dL	Transferrin	119	95,2	142,8

SÍMBOLOS



Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Uso médico-diagnóstico "in vitro"



Conteúdo suficiente para <n> testes



Data de validade



Limite de temperatura (conservar a)



Não congelar



Risco biológico



Volume após a reconstituição



Conteúdo



Número de lote



Elaborado por:



Nocivo



Corrosivo / Caústico



Irritante



Consultar as instruções de uso



Calibrador



Controle



Controle Positivo



Controle Negativo



Número de catálogo

Termo de garantia

Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio deste kit, assim como em sua conservação.



Produtos para Laboratórios Ltda.
Estrada do Capão Bonito, 489
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07263-010
CNPJ: 72.807.043/0001-94
Atendimento ao cliente:
+55 (11) 2480 0529/+55 (11) 2499 1277
sac@laborlab.com.br
www.laborlab.com.br