

**Finalidade**

Para a calibração de métodos imunoturbidimétricos.

Aplicações

O **Protein Calibrator** foi desenvolvido para ser utilizado com os reagentes turbidimétricos da Laborlab. Consultar a tabela anexa para valores estabelecidos para os constituintes, visto os mesmos são lote específicos.

Reagentes fornecidos

Calibrador: soro inativo com conservantes apropriados.

Instruções de uso

Calibrador: pronto para uso.

Precauções

O reagente é para uso diagnóstico "in vitro".

Evitar a ingestão e contato com a pele.

O calibrador foi preparado partindo de material não reagente para HBsAg e HIV. No entanto, devem ser manipulados como se tratando de material infectante.

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação local vigente.

Estabilidade e instruções de armazenamento

Calibrador: estável sob refrigeração (2-10°C) até a data do vencimento indicada na embalagem. Não congelar.

Uma vez aberta a embalagem é estável por 30 dias sob refrigeração (2-10°C). Não congelar.

Apresentação

- 1 x 1 ml (Cód. 1770620)

VALORES ESTABELECIDOS			
PROTEÍNA	MÉTODO	VALOR	
		(mg/dl)	(g/l)
α1-Glicoproteína	a1-Acid Glycoprotein (AGP)	212	2,12
Componente C3	C3	395	3,95
Componente C4	C4	69	0,69
Imunoglobulina A	IgA	496	4,96
Imunoglobulina G	IgG	2550	25,5
Imunoglobulina M	IgM	214	2,14
Transferrina	Transferrin	725	7,25

Lote kit: 16040056

Lote frasco: 16042094

Val.: 04/2017

SÍMBOLOS



Este produto preenche os requisitos da Diretiva Européia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"

Representante autorizado na Comunidade Européia

Uso médico-diagnóstico "in vitro"

Conteúdo suficiente para <n> testes

Data de validade

Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

Risco biológico

Volume após da reconstituição

Conteúdo

Número de lote

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controle

Controle Positivo

Controle Negativo

Número de catálogo

Termo de garantia

Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio deste kit, assim como em sua conservação.



Produtos para Laboratórios Ltda.
Estrada do Capão Bonito, 489
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07263-010
CNPJ: 72.807.043/0001-94
Atendimento ao cliente:
+55 (11) 2480 0529/+55 (11) 2499 1277
sac@laborlab.com.br
www.laborlab.com.br