



Protocolos sugeridos ADVIA 1200®



Assessoria Científica Laborlab

Revisão 2.6.20



Índice

Acido Urico	3.
Albumina	4.
Amilase	5.
Bilirrubina Direta	6.
Bilirrubina Total	7.
Calcio Arsenazo	8.
CKMB	9.
CPK	10.
Colesterol	11.
Creatinina	12.
Ferro	13.
Fosfatase Alcalina	14.
Fosforo	15.
Gama GT	16.
HbA1c	17.
HB	18.
Glicose	19.
Lactato	20.
TGO (AST)	21.
TGP (ALT)	22.
HDL Colesterol	23.
LDH	24.
Magnésio	25.
PCR	26.
PCR Ultrasensível	27.
Proteína Total	28.
Proteína Total Urinária	29.
Triglicérides	30.
Uréia	31.
AGP	32.
ASO	33.
C3	34.
C4	35.
IgA	36.
IgG	37.
IGM	38.



FR	39.
Microalbumina	40.
Transferrina	41.



ÁCIDO URICO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: UricAcid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos - H: 3,5 a 7,2 mg/dL

M: 2,6 a 6,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>80 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>2 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 strir	<u>Weak</u>
Reagent 2 strir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>6 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>ACU</u>
Digits	<u>1</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>596 nm</u>
S-wave. L.	<u>658 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Metod setting

M-DET. P.I	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>18</u>
S-DET. P.r	<u>19</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



ALBUMINA

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: ALBUMIN

Código: 1770010

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (g/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 100 ul
 R2 Volume N.A.
 R1 extra vol N.A.
 R2 extra vol N.A.
 R1 diluent vol N.A.
 R2 diluent vol N.A.
 Sample Vol (s) 1 ul
 Sample Vol (u) N.A.
 Reagent 1 stir Weak
 Reagent 2 stir Weak
 Reaction time 10 min

Sub-analy. Conditions

Name ALB
 Digits 1
 UNIT g/dL
 M-wave. L. 596 nm
 S-wave. L. 658 nm
 Analy.mtdh EPA
 Calc.mthd STD
 Qualit Judge Not do

Standards setting

FV #

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
 M-DET. P.m 18
 M-DET. P.n 19
 S-DET. P. p 0
 S-DET. P.r 0
 Check D.P.l 0
 Limit Value 0,003
 Variance 10
 React. Type INC
 *Reaction rate Method
 Cycle 2
 Factor 2,0



AMILASE

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Amylase

Código: 1770020

Apresentação: RA: 2 x 30 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma heparinizado ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume	<u>120 ul</u>
R2 Volume	<u>N.A.</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>3 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>3 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>AMI</u>
Digits	<u>1</u>
UNIT	<u>U/L</u>
M-wave. L.	<u>405 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>RRA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.I	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>14</u>
M-DET. P.n	<u>23</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



BILIRRUBINA DIRETA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Bilirubin D

Código: 1770030

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: até 0,2 mg/dL

Linearidade: 12 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>8 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>6 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>BDL</u>
Digits	<u>2</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>545 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>41</u>
S-DET. P. p	<u>17</u>
S-DET. P.r	<u>18</u>
Check D.P.l	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



BILIRUBINA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Bilirubin T

Código: 1770040

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL

Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL

Até 48hs: 3,4 a 11,5 mg/dL

Do 3° a 5° dia: 1,5 a 12,0 mg/dL

Adultos: até 1,0 mg/dL

Linearidade: 30 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>8 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 strir	<u>Weak</u>
Reagent 2 strir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>6 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>BTL</u>
Digits	<u>2</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>545 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.I	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>41</u>
S-DET. P. p	<u>17</u>
S-DET. P.r	<u>18</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



CÁLCIO ARSENAZO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Cálcio Arsenazo

Código: 1770050

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ,plasma heparinizado ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL

Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume 100 ul
 R2 Volume N.A.
 R1 extra vol N.A.
 R2 extra vol N.A.
 R1 diluent vol N.A.
 R2 diluent vol N.A.
 Sample Vol (s) 1 ul
 Sample Vol (u) N.A.
 Reagent 1 stir Weak
 Reagent 2 stir Weak
 Reaction time 5 min

Sub-analy. Conditions

Name CAA
 Digits 1
 UNIT mg/dL
 M-wave. L. 658 nm
 S-wave. L. 0 nm
 Analy.mtdh EPA
 Calc.mthd STD
 Qualit Judge Not do

Standards setting

FV #

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
 M-DET. P.m 18
 M-DET. P.n 19
 S-DET. P. p 0
 S-DET. P.r 0
 Check D.P.l 0
 Limit Value 0.003
 Variance 10
 React. Type INC
 *Reaction rate Method
 Cycle 2
 Factor 2.0



CK MB

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: CK MB

Código: 1770060

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Controle do kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 100 ul
R2 Volume 20 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 5 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 strir Weak
Reagent 2 strir Weak
Reaction time 10 min

Sub-analy. Conditions

Name CKMB
Digits 0
UNIT U/L
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh RRA
Calc.mthd STD
Qualit Judge Not do

Standards setting

FV #

Calculation Metod setting

M-DET. P.I 0
M-DET. P.m 28
M-DET. P.n 40
S-DET. P. p 0
S-DET. P.r 0
Check D.P.I 0
Limit Value 0.003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2.0



CPK

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: CK Nac

Código: 1770070

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: H até 195 U/L

M até 170 U/L

Linearidade: 1800 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>5 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 strir	<u>Weak</u>
Reagent 2 strir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>CK</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>U/L</u>
M-wave. L.	<u>340 nm</u>
S-wave. L.	<u>410 nm</u>
Analy.mtdh	<u>RRA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Metod setting

M-DET. P.I	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>25</u>
M-DET. P.n	<u>41</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0.003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2.0</u>



COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Colesterol
COD-PAD Liquid Stable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Ótimo: < 200 mg/dL

Moderadamente alto: 200-239 mg/dL

Elevado: ≥ 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume 100 ul
R2 Volume N.A.
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 1 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 strir Weak
Reagent 2 strir Weak
Reaction time 10 min

Sub-analy. Conditions

Name COL
Digits 1
UNIT mg/dL
M-wave. L. 505 nm
S-wave. L. 694 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd STD
Qualit Judge Not do

Standards setting

FV #

Calculation Method setting

M-DET. P.I 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 42
S-DET. P. p 0
S-DET. P.r 0
Check D.P.I 0
Limit Value 0.003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2.0



CREATININA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Creatinine

Código: 1770100

Apresentação: RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 0,7 a 1,3 mg/dL

M: 0,6 a 1,1 mg/dL

Linearidade: 9,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 ul</u>
R2 Volume	<u>25 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>5 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 strir	<u>Weak</u>
Reagent 2 strir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>CREA</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>505 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>RRA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Metod setting

M-DET. P.I	<u>21</u>
M-DET. P.m	<u>26</u>
M-DET. P.n	<u>32</u>
S-DET. P. p	<u>14</u>
S-DET. P.r	<u>18</u>
Check D.P.I	<u>21</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



FERRO

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Iron

Código: 1770180

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M 50 – 170 µg/dL

H 65 – 175 µg/dL

Linearidade: 1500 µg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (µg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 µl</u>
R2 Volume	<u>20 µl</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>20 µl</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>FEL</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>596 nm</u>
S-wave. L.	<u>694 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.I	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>18</u>
S-DET. P.r	<u>19</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0.003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2.0</u>



FOSFATASE ALCALINA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Alkaline Phosphatase

Código: 1770110

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L
Adultos: 65 a 300 U/L

Linearidade: 1500 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume 120 ul
R2 Volume 30 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 3 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 strir Weak
Reagent 2 strir Weak
Reaction time 7 min

Sub-analy. Conditions

Name ALP
Digits 0
UNIT U/L
M-wave. L. 410 nm
S-wave. L. 478 nm
Analy.mtdh RRA
Calc.mthd STD
Qualit Judge Not do

Standards setting

FV #

Calculation Metod setting

M-DET. P.l 21
M-DET. P.m 25
M-DET. P.n 42
S-DET. P. p 0
S-DET. P.r 0
Check D.P.I 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2,0



FÓSFORO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Phosphorus

Código: 1770250

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 ul</u>
R2 Volume	<u>N.A.</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>1 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 strir	<u>Weak</u>
Reagent 2 strir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>5 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>FOSF</u>
Digits	<u>1</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>340 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.I	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0.003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2.0</u>



GAMA GT

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Gama
Glutamil Transferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L
H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do
laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)
@ Parâmetro será calculado pelo
equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>80 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>10 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>7 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>GGT</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>U/L</u>
M-wave. L.	<u>410 nm</u>
S-wave. L.	<u>694 nm</u>
Analy.mtdh	<u>RRA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>21</u>
M-DET. P.m	<u>24</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.I	<u>21</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



HbA1c

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: HbA1c

Código: 1770580

Apresentação: 1 x 25 mL A1
1 x 5 mL A2
1 x 25 mL B

NOTAS

Reativo de trabalho:

Vide Bula

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Sangue Total Anticoagulado

Calibração:

HbA1c Calibrator

Controle de Qualidade:

HbA1c Control

Valores de Referência:

4,8 – 5,9 %

Linearidade:

14 g/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>125 ul</u>
R2 Volume	<u>25 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>5 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>HbA1c</u>
Digits	<u>2</u>
UNIT	<u>g/dL</u>
M-wave. L.	<u>340 nm</u>
S-wave. L.	<u>694 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>MSTD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>41</u>
S-DET. P. p	<u>17</u>
S-DET. P.r	<u>18</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



HB

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: HbA1c

Código: 1770580

Apresentação: 1 x 25 mL A1
1 x 5 mL A2
1 x 25 mL B

NOTAS

Reativo de trabalho:

Vide Bula

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Sangue Total Anticoagulado

Calibração:

HbA1c Calibrator

Controle de Qualidade:

HbA1c Control

Valores de Referência:

4,8 – 5,9 %

Linearidade: 14 g/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 125 ul
R2 Volume N.A.
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 13.5 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 5 min

Sub-analy. Conditions

Name HB
Digits 0
UNIT g/dL
M-wave. L. 571 nm
S-wave. L. 694 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd STD
Qualit Judge Not do

Standards setting

FV #

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 42
S-DET. P. p 0
S-DET. P.r 0
Check D.P.l 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2,0



GLICOSE

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Glicose GOD
PAP Liquid Stable.

Código: 1770130

Apresentação: RA: 2 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma, urina ou líquido cefalorraquidiano (LCR).

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

0 a 1 dia: 50 a 80 mg/dL
Neonatos: 40 a 60 mg/dL
Crianças: 60 a 100 mg/dL
Adulto: 74 a 106 mg/dL
Urina isolada: 1 a 15mg/dL
Urina 24horas: <0,5 g/24hs
LCR: Crianças 60 a 80 mg/dL
Adultos 40 a 70 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 100 ul
R2 Volume N.A.
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 1 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 10 min

Sub-analy. Conditions

Name GLI
Digits 0
UNIT mg/dL
M-wave. L. 505 nm
S-wave. L. 694 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd STD
Qualit Judge Not do

Standards setting

FV #

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 42
S-DET. P. p 0
S-DET. P.r 0
Check D.P.I 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2,0



LACTATO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Lactate

Código: 1770200

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Plasma ou líquido cefalorraquidiano (LCR).

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue venoso: 4,5 a 19,8 mg/dL

Sangue arterial: < 11,3 mg/dL

LCR adulto: 10 a 25 mg/dL

Linearidade: 130 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume 80 ul
R2 Volume 20 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 2 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 10 min

Sub-analy. Conditions

Name LACT
Digits 1
UNIT mg/dL
M-wave. L. 545 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd STD
Qualit Judge Not do

Standards setting

FV #

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
M-DET. P.m 41
M-DET. P.n 42
S-DET. P. p 17
S-DET. P.r 18
Check D.P.l 0
Limit Value 0.003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2.0



TGO (AST)

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L
H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>80 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>10 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>TGO</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>U/L</u>
M-wave. L.	<u>340 nm</u>
S-wave. L.	<u>410 nm</u>
Analy.mtdh	<u>RRA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>22</u>
M-DET. P.m	<u>25</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.l	<u>21</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>DEC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



TGP (ALT)

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L
H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 80 ul
R2 Volume 20 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 10 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 10 min

Sub-analy. Conditions

Name TGP
Digits 0
UNIT U/L
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 410 nm
Analy.mtdh RRA
Calc.mthd STD
Qualit Judge Not do

Standards setting

FV #

Calculation Method setting

M-DET. P.l 22
M-DET. P.m 25
M-DET. P.n 42
S-DET. P. p 0
S-DET. P.r 0
Check D.P.l 21
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type DEC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2,0



HDL COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: HDL
Colesterol Direto.

Código: 1770160

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Próprio do kit

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Homens: 30 – 70mg/dL
Mulheres: 30 – 85mg/dL

Linearidade: 200 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>80 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>1 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>HDL</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>596 nm</u>
S-wave. L.	<u>694 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>17</u>
S-DET. P.r	<u>18</u>
Check D.P.l	<u>0</u>
Limit Value	<u>0.003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2.0</u>



LDH

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: LDH-P Liquid Stable

Código: 1770210

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

Linearidade:

1000 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>80 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>2 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>LDH</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>U/L</u>
M-wave. L.	<u>340 nm</u>
S-wave. L.	<u>410 nm</u>
Analy.mtdh	<u>RRA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Metod setting

M-DET. P.l	<u>21</u>
M-DET. P.m	<u>26</u>
M-DET. P.n	<u>39</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.I	<u>21</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>DEC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



MAGNÉSIO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Magnesium

Código: 1770220

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma heparinizado ou urina

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs: 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do alibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 ul</u>
R2 Volume	<u>N.A.</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>1 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>MG</u>
Digits	<u>1</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>505 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.l	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



PCR

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: CRP

Código: 1770240

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>8 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>PCR</u>
Digits	<u>2</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>340 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>MSTD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>41</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>16</u>
S-DET. P.r	<u>17</u>
Check D.P.l	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



PCR ULTRASENSÍVEL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: HS CRP

Código: 1770170

Apresentação: RA: 1 x 20 mL
RB: 1 X 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 uL</u>
R2 Volume	<u>100 uL</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>4 uL</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Analysis Item Condition

Dilution Method	<u>A dilution</u>
Undiluted Sample VOL.	<u>25</u>
Diluent Volume	<u>75</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>PCRHS</u>
Digits	<u>2</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>571 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>MSTD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.I	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>41</u>
S-DET. P. p	<u>17</u>
S-DET. P.r	<u>18</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



PROTEÍNA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Protal

Código: 1770260

Apresentação: RA: 1 x 250 m

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 g/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (g/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>120 ul</u>
R2 Volume	<u>N.A.</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>2 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 strir	<u>Weak</u>
Reagent 2 strir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>PROT</u>
Digits	<u>1</u>
UNIT	<u>g/dL</u>
M-wave. L.	<u>545 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Metod setting

M-DET. P.l	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0.003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2.0</u>



PROTEÍNA URINÁRIA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Prot U/LCR

Código: 1770350

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Urina ou líquido cefalorraquidiano (LCR).

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 1 a 15 mg/dL

U. 24 horas: 28 a 141 mg/24 horas

Linearidade: 150 mg/dL

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 ul</u>
R2 Volume	<u>N.A.</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>2 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>PTU</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>596 nm</u>
S-wave. L.	<u>0 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>18</u>
M-DET. P.n	<u>19</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.l	<u>0</u>
Limit Value	<u>0.003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2.0</u>



TRIGLICÉRIDES

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Triglicérides
GOD PAP Líquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Ótimo: <150 mg/dL

Moderadamente elevado: 150-199 mg/dL

Elevado: 200-499 mg/dL

Muito elevado: ≥ 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>100 uL</u>
R2 Volume	<u>N.A.</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>1 uL</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>TRI</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>505 nm</u>
S-wave. L.	<u>694 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>42</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.l	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



URÉIA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Uréia UV
Liquid Stable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 a 43 mg/dL
Urina: 26 a 43 g/24hs

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>80 ul</u>
R2 Volume	<u>20 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>1.5 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>URE</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>340 nm</u>
S-wave. L.	<u>410 nm</u>
Analy.mtdh	<u>RRA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>21</u>
M-DET. P.m	<u>24</u>
M-DET. P.n	<u>31</u>
S-DET. P. p	<u>0</u>
S-DET. P.r	<u>0</u>
Check D.P.I	<u>21</u>
Limit Value	<u>0.003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>DEC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2.0</u>



AGP

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: AGP
Turbitest AA

Código: 1770530

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 5 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma.

Calibração:

Protein Calibrator

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Adultos: 50 a 120 mg/dL

Linearidade: 250 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume 160 ul
R2 Volume 30 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 8 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 10 min

Analysis Item Condition

Dilution Method A dilution
Undiluted Sample VOL. 10
Diluent Volume 90

Sub-analy. Conditions

Name AGP WI
Digits 0
UNIT mg/dL
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd MSTD
Qualit Judge Not do

Standards Setting

Spline Correction

PV	Dil Method	Dil smp.vol	Diluent col
#13.94	special	10.00	90.00
#27.88	special	10.00	90.00
#55.75	special	10.00	90.00
#111.5	special	10.00	90.00
#223	special	10.00	90.00

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 41
S-DET. P. p 18
S-DET. P.r 19
Check D.P.l 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2,0



ASO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Anti Streptolysin O

Código: 1770340

Apresentação: RA: 1 x 12 mL
RB: 1 x 15 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

ASO Calibrator

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 200 UI/L

Linearidade: 1.000UI/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume	<u>75 ul</u>
R2 Volume	<u>125 ul</u>
R1 extra vol	<u>N.A.</u>
R2 extra vol	<u>N.A.</u>
R1 diluent vol	<u>N.A.</u>
R2 diluent vol	<u>N.A.</u>
Sample Vol (s)	<u>25 ul</u>
Sample Vol (u)	<u>N.A.</u>
Reagent 1 stir	<u>Weak</u>
Reagent 2 stir	<u>Weak</u>
Reaction time	<u>10 min</u>

Sub-analy. Conditions

Name	<u>ASO WI</u>
Digits	<u>0</u>
UNIT	<u>mg/dL</u>
M-wave. L.	<u>596 nm</u>
S-wave. L.	<u>694 nm</u>
Analy.mtdh	<u>EPA</u>
Calc.mthd	<u>STD</u>
Qualit Judge	<u>Not do</u>

Standards setting

FV	<u>#</u>
----------	----------

Calculation Method setting

M-DET. P.l	<u>0</u>
M-DET. P.m	<u>40</u>
M-DET. P.n	<u>41</u>
S-DET. P. p	<u>18</u>
S-DET. P.r	<u>19</u>
Check D.P.I	<u>0</u>
Limit Value	<u>0,003</u>
Variance	<u>10</u>
React. Type	<u>INC</u>
*Reaction rate Method	
Cycle	<u>2</u>
Factor	<u>2,0</u>



C3

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: C3

Código: 1770480

Apresentação: RA: 1 x 30 mL
RB: 1 x 2,5 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma.

Calibração:

Protein Calibrator

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Adultos: 90 a 180 mg/dL

Linearidade:

400 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 195 ul
R2 Volume 40 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 2 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 strir Weak
Reagent 2 strir Weak
Reaction time 10 min

Analysis Item Condition

Dilution Method A dilution
Undiluted Sample VOL 10
Diluent Volume 90

Sub-analy. Conditions

Name C3
Digits 0
UNIT mg/dL
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd MSTD
Qualit Judge Not do

Standards Setting (Exemplo: Concentração calibrador 223)

Spline Correction

PV	Dil Method	Dil smp.vol	Diluent col
#13.94	special	10.00	90.00
#27.88	special	10.00	90.00
#55.75	special	10.00	90.00
#111.5	special	10.00	90.00
#223	special	10.00	90.00

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 41
S-DET. P. p 18
S-DET. P. r 19
Check D.P.l 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC

*Reaction rate Method



C4

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: C4

Código: 1770490

Apresentação: RA: 1 x 30 mL
RB: 1 x 2,5 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma.

Calibração:

Protein Calibrator

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Adultos: 10 a 40 mg/dL

Linearidade: 70 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 195 ul
R2 Volume 40 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 3 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 strir Weak
Reagent 2 strir Weak
Reaction time 10 min

Analysis Item Condition

Dilution Method A dilution
Undiluted Sample Vol. 10
Diluent Volume 90

Sub-analy. Conditions

Name C4
Digits 0
UNIT mg/dL
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd MSTD
Qualit Judge Not do

Standards Setting (Exemplo: Concentração calibrador 223)

Spline Correction

PV	Dil Method	Dil smp.vol	Diluent col
#13.94	special	10.00	90.00
#27.88	special	10.00	90.00
#55.75	special	10.00	90.00
#111.5	special	10.00	90.00
#223	special	10.00	90.00

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 41
S-DET. P. p 18
S-DET. P. r 19
Check D.P.l 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle



IgA

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: IgA

Código: 1770430

Apresentação: RA: 1 x 30 mL
RB: 1 x 5 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma.

Calibração:

Protein Calibrator

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Adultos: 70 a 400 mg/dL

Linearidade: 600 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 200 ul
R2 Volume 30 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 6 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 10 min

Analysis Item Condition

Dilution Method A dilution
Undiluted Sample Vol. 10
Diluent Volume 90

Sub-analy. Conditions

Name IgA
Digits 0
UNIT mg/dL
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd MSTD
Qualit Judge Not do

Standards Setting (Exemplo: Concentração calibrador 551)

Spline Correction

PV	Dil Method	Dil smp.vol	Diluent col
#34.44	special	10.00	90.00
#68.88	special	10.00	90.00
#137.75	special	10.00	90.00
#275.5	special	10.00	90.00
#551	special	10.00	90.00

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 41
S-DET. P. p 18
S-DET. P.r 19
Check D.P.l 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2,0



IgG

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: IgG

Código: 1770440

Apresentação: RA: 1 x 30 mL
RB: 1 x 2,5 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma.

Calibração:

Protein Calibrator

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Adultos: 700 a 1600 mg/dL

Linearidade: 2800 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 160 ul
R2 Volume 20 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 5 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 10 min

Analysis Item Condition

Dilution Method A dilution
Undiluted Sample Vol. 10
Diluent Volume 90

Sub-analy. Conditions

Name IgG
Digits 0
UNIT mg/dL
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd MSTD
Qualit Judge Not do

Standards Setting (Exemplo: Concentração calibrador 2721)

Spline Corretion

PV	Dil Method	Dil smp.vol	Diluent col
#170.06	special	10.00	90.00
#340.13	special	10.00	90.00
#680.25	special	10.00	90.00
#1360.5	special	10.00	90.00
#2721	special	10.00	90.00

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 41
S-DET. P. p 18
S-DET. P.r 19
Check D.P.l 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2,0



IgM

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: IgM

Código: 1770450

Apresentação: RA: 1 x 30 mL
RB: 1 x 2,5 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma.

Calibração:

Protein Calibrator

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Adultos: 40 a 260 mg/dL

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 150 ul
R2 Volume 30 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 10 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 10 min

Analysis Item Condition

Dilution Method A dilution
Undiluted Sample Vol. 10
Diluent Volume 90

Sub-analy. Conditions

Name IgM
Digits 0
UNIT mg/dL
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd MSTD
Qualit Judge Not do

Standards Setting (Exemplo: Concentração calibrador 252)

Spline Correction

PV	Dil Method	Dil smp.vol	Diluent col
#15.7	special	10.00	90.00
#31.5	special	10.00	90.00
#63	special	10.00	90.00
#126	special	10.00	90.00
#252	special	10.00	90.00

Calculation Method setting

M-DET. P.l 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 41
S-DET. P. p 18
S-DET. P.r 19
Check D.P.l 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2,0



FR

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Rheumatoid Factor

Código: 1770330

Apresentação: RA: 1 x 30 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma.

Calibração:

Calibrador FR

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 20 UI/mL

Linearidade: 120 UI/mL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (UI/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 120 ul
R2 Volume 18 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 12 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 10

Analysis Item Condition

Dilution Method A dilution
Undiluted Sample VOL 12
Diluent Volume 30

Sub-analy. Conditions

Name FR
Digits 0
UNIT UI/mL
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 694 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd MSTD
Qualit Judge Not do

Standards Setting (Exemplo: Concentração calibrador 94.2)

Spline Correction

PV	Dil Method	Dil smp.vol	Diluent col
#18.8	special	3.00	57.00
#37.7	special	6.00	54.00
#56.5	special	9.00	51.00
#75.4	special	12.0	48.00
#94.2	special	8.00	15.00

Calculation Metod setting

M-DET. P.I 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 41
S-DET. P. p 18
S-DET. P.r 19
Check D.P.I 0
Limit Value 0.003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2



MICROALBUMINA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Microalbumin

Código: 1770420

Apresentação: RA: 1 x 25 mL
RB: 1 x 5 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Urina.

Calibração:

Acompanha o reagente

Controle de Qualidade:

Microalbumin Control

Linearidade: 250 mg/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ADVIA 1200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Analytical conditions

R1 Volume 150 ul
R2 Volume 30 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 9 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 stir Weak
Reagent 2 stir Weak
Reaction time 10 min

Analysis Item Condition

Dilution Method A dilution
Undiluted Sample VOL. 10
Diluent Volume 90

Sub-analy. Conditions

Name Mal
Digits 0
UNIT mg/dL
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd MSTD
Qualit Judge Not do

Standards Setting (Exemplo: Concentração calibrador 252)

Spline Correction

PV	Dil Method	Dil smp.vol	Diluent col
#15.7	special	10.00	90.00
#31.5	special	10.00	90.00
#63	special	10.00	90.00
#126	special	10.00	90.00
#252	special	10.00	90.00

Calculation Metod setting

M-DET. P.I 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 41
S-DET. P. p 18
S-DET. P.r 19
Check D.P.I 0
Limit Value 0.003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2.0



TRANSFERRINA

ADVIA 1200[®]

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Transferrin

Código: 1770550

Apresentação: RA: 1 x 25 mL
RB: 1 x 5 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma.

Calibração:

Protein Calibrator

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Adultos: 200 a 360 mg/dL

Linearidade: 600 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Analytical conditions

R1 Volume 125 ul
R2 Volume 25 ul
R1 extra vol N.A.
R2 extra vol N.A.
R1 diluent vol N.A.
R2 diluent vol N.A.
Sample Vol (s) 4 ul
Sample Vol (u) N.A.
Reagent 1 strir Weak
Reagent 2 strir Weak
Reaction time 10 min

Analysis Item Condition

Dilution Method A dilution
Undiluted Sample VOL 10
Diluent Volume 90

Sub-analy. Conditions

Name Transf
Digits 0
UNIT mg/dL
M-wave. L. 340 nm
S-wave. L. 0 nm
Analy.mtdh EPA
Calc.mthd MSTD
Qualit Judge Not do

Standards Setting (Exemplo: Concentração calibrador 252)

Spline Correction

PV	Dil Method	Dil smp.vol	Diluent col
#15.7	special	10.00	90.00
#31.5	special	10.00	90.00
#63	special	10.00	90.00
#126	special	10.00	90.00
#252	special	10.00	90.00

Calculation Method setting

M-DET. P.I 0
M-DET. P.m 40
M-DET. P.n 41
S-DET. P. p 18
S-DET. P.r 19
Check D.P.I 0
Limit Value 0,003
Variance 10
React. Type INC
*Reaction rate Method
Cycle 2
Factor 2,0