



Protocolos sugeridos AIRONE 200®



Os protocolos aqui descritos, devem ser validados com os ensaios correspondentes e seu desempenho deverá ser verificado com uma adequada planificação e execução sistemática do controle de qualidade.

Assessoria LaborLab.

Versão 3.6.20



Índice

Acido Urico	2.
Albumina	3.
Amilase	4.
Bilirrubina Direta	5.
Bilirrubina Total.....	6.
Calcio Arsenazo	7.
CKMB	8.
CPK.....	9.
Colesterol	10.
Creatinina	11.
Ferro	12.
Fosfatase Alcalina	13.
Fosforo.....	14.
Gama GT.....	15.
Glicose	16.
Lactato	17.
TGO (AST)	18.
TGP (ALT).....	19.
HDL Colesterol.....	20.
LDH.....	21.
Magnésio	22.
PCR.....	23.
PCR Ultrasensível.....	24.
Proteína Total.....	25.
Proteína Total Urinária	26.
Triglicérides	27.
Uréia	28.



ÁCIDO URICO

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: UricAcid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 2,5 a 6,0 mg/dL
M: 2,6 a 5,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name AcidoUrico
Decimal 1
Measure Unit mg/dL
ReactionType End Point
Sample Volume 10 ul
Reagent Volume R1 400 ul
Reagent Volume R2 100
ABS Range Min -100
ABS Range Max 500
LinearityLimit 20
Contaminating No
ReagentBlanking Yes
Differential No
Filters 1 510
Filters 2 None
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0,30
Incubation 1 5
Incubation 2 300
LAG Phase 2
Measure 1
MeasurementType
Calibrate Standard
Factor 0



ALBUMINA

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: ALBUMIN

Código: 1770010

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Albumina
 Decimal 1
 Measure Unit g/dL
 ReactionType End Point
 Sample Volume 3 ul
 Reagent Volume R1 500 ul
 Reagent Volume R2 0
 ABS Range Min 0
 ABS Range Max 500
 LinearityLimit 7
 Contaminating No
 ReagentBlanking Yes
 Differential No
 Filters 1 620
 Filters 2 None
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0
 Incubation 1 60
 Incubation 2 0
 LAG Phase 2
 Measure 1
MeasurementType
 Calibrate Standard
 Factor 0



AMILASE

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Amylase

Código: 1770020

Apresentação: RA: 2 x 30 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name	<u>Amylase</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>10ul</u>
Reagent Volume R1	<u>400 ul</u>
Reagent Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min	<u>-100</u>
ABS Range Max	<u>600</u>
LinearityLimit	<u>2000</u>
Contaminating	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>405</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times	
Time Mix 1 (sec)	<u>0</u>
Time Mix 2 (sec)	<u>0</u>
Incubation 1	<u>40</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>10</u>
Measure	<u>30</u>
MeasurementType	
Calibrate	<u>Factor</u>
Factor	<u>3178</u>



BILIRRUBINA DIRETA

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Bilirubin D

Código: 1770030

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: até 0,4 mg/dL

Linearidade: 12 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Bili Direta
Decimal 2
Measure Unit mg/dL
ReactionType End Point
Sample Volume 40 ul
Reagent Volume R1 350 ul
Reagent Volume R2 88 ul
ABS Range Min -100
ABS Range Max 500
LinearityLimit 12
Contaminating No
ReagentBlanking Yes
Differential No
Filters 1 546
Filters 2 620
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 5
Incubation 2 300
LAG Phase 2
Measure 8
MeasurementType
Calibrate Standard
Factor 0



BILIRUBINA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Bilirubin T

Código: 1770040

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL
Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL
Até 48hs: 3,4 a 11,5 mg/dL
Do 3° a 5° dia: 1,5 a 12,0 mg/dL
Adultos: até 1,0 mg/dL

Linearidade: 30 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Bili Total
Decimal 2
Measure Unit mg/dL
ReactionType End Point
Sample Volume 40 ul
Reagent Volume R1 350 ul
Reagent Volume R2 88 ul
ABS Range Min -100
ABS Range Max 500
LinearityLimit 30
Contaminating No
ReagentBlanking Yes
Differential No
Filters 1 546
Filters 2 620
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 5
Incubation 2 300
LAG Phase 2
Measure 8
MeasurementType
Calibrate Standard
Factor 0



CÁLCIO ARSENAZO

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Cálcio
Arsenazo

Código: 1770050

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL

Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Calcio
 Decimal 1
 Measure Unit mg/dL
 ReactionType End Point
 Sample Volume 5ul
 Reagent Volume R1 500 ul
 Reagent Volume R2 0
 ABS Range Min -100
 ABS Range Max 1500
 LinearityLimit 13
 Contaminating No
 ReagentBlanking Yes
 Differential No
 Filters 1 620
 Filters 2 None
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0
 Incubation 1 300
 Incubation 2 0
 LAG Phase 2
 Measure 1
MeasurementType
 Calibrate Standard
 Factor 0



CK MB

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Ck MB

Código: 1770060

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

Controle do Kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name CKMB
 Decimal 0
 Measure Unit U/L
 ReactionType Kinetic
 Sample Volume 20ul
 Reagent Volume R1 500 ul
 Reagent Volume R2 0
 ABS Range Min -100
 ABS Range Max 700
 LinearityLimit 500
 Contaminating No
 ReagentBlanking No
 Differential No
 Filters 1 340
 Filters 2 None
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0
 Incubation 1 400
 Incubation 2 0
 LAG Phase 20
 Measure 80
MeasurementType
 Calibrate Factor
 Factor 8254



CPK

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: CK Nac

Código: 1770070

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: H até 195 U/L
M até 170 U/L

Linearidade: 1800 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name CK
Decimal 0
Measure Unit U/L
ReactionType Kinetic
Sample Volume 10ul
Reagent Volume R1 500 ul
Reagent Volume R2 0
ABS Range Min -100
ABS Range Max 700
LinearityLimit 1500
Contaminating No
ReagentBlanking No
Differential No
Filters 1 340
Filters 2 None
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 170
Incubation 2 0
LAG Phase 15
Measure 50
MeasurementType
Calibrate Factor
Factor 8095



COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Colesterol
COD-PAD LiquidStable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: < 200 mg/dL
Limiar elevado 200-239 mg/dL
Elevado: 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test NameColesterol
Decimal0
Measure Unitmg/dL
ReactionTypeEnd Point
Sample Volume5ul
Reagent Volume R1500 ul
Reagent Volume R20
ABS Range Min-100
ABS Range Max300
LinearityLimit500
ContaminatingNo
ReagentBlankingYes
DifferentialNo
Filters 1510
Filters 2None
Times
Time Mix 1 (sec)0
Time Mix 2 (sec)0
Incubation 1300
Incubation 20
LAG Phase2
Measure1
MeasurementType
CalibrateStandard
Factor0



CREATININA

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Creatinine

Código: 1770100

Apresentação: RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto Homem 0,70 a 1,20 mg/dL
Adulto Mulher 0,53 a 1,00 mg/dL

Linearidade: 9,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Creatinina
Decimal 2
Measure Unit mg/dL
ReactionType Tempo Fixo
Sample Volume 50 ul
Reagent Volume R1 240 ul
Reagent Volume R2 60ul
ABS Range Min -100
ABS Range Max 550
LinearityLimit 9
Contaminating Yes
ReagentBlanking No
Differential No
Filters 1 510
Filters 2 None
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 30
Incubation 2 5
LAG Phase 10
Measure 30
MeasurementType
Calibrate Standard
Factor 0



FERRO

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Iron

Código: 1770180

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: M 65 – 175 ug/dL
H 60 – 170 ug/dL

Linearidade: 1000 ug/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name Ferro
Decimal 0
Measure Unit ug/dL
ReactionType End Point
Sample Volume 40 ul
Reagent Volume R1 200 ul
Reagent Volume R2 40ul
ABS Range Min -100
ABS Range Max 500
LinearityLimit 1000
Contaminating No
ReagentBlanking Yes
Differential No
Filters 1 600
Filters 2 None
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 5
Incubation 2 300
LAG Phase 2
Measure 8
MeasurementType
Calibrate Standard
Factor 0



FOSFATASE ALCALINA

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab:

AlkalinePhosphatase

Código: 1770110

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L

Adultos: 65 a 300 U/L

Linearidade: 1500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name ALP
 Decimal 0
 Measure Unit U/L
 ReactionType Kinetic
 Sample Volume 5ul
 Reagent Volume R1 400 ul
 Reagent Volume R2 100 ul
 ABS Range Min -100
 ABS Range Max 700
 LinearityLimit 1500
 Contaminating No
 ReagentBlanking No
 Differential No
 Filters 1 405
 Filters 2 None
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0
 Incubation 1 20
 Incubation 2 60
 LAG Phase 20
 Measure 40
MeasurementType
 Calibrate Factor
 Factor 5459



FOSFORO

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Phosphorus

Código: 1770250

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name Fosforo
 Decimal 1
 Measure Unit mg/dL
 ReactionType End Point
 Sample Volume 5ul
 Reagent Volume R1 500 ul
 Reagent Volume R2 0
 ABS Range Min -100
 ABS Range Max 800
 LinearityLimit 16
 Contaminating No
 ReagentBlanking Yes
 Differential No
 Filters 1 340
 Filters 2 None
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0
 Incubation 1 360
 Incubation 2 0
 LAG Phase 3
 Measure 1
MeasurementType
 Calibrate Standard
 Factor 0



GAMA GT

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Gama
GlutamilTransferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L
H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do
Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo
equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name GGT
Decimal 0
Measure Unit U/L
ReactionType Kinetic
Sample Volume 25ul
Reagent Volume R1 200 ul
Reagent Volume R2 50 ul
ABS Range Min -100
ABS Range Max 800
LinearityLimit 1200
Contaminating No
ReagentBlanking No
Differential No
Filters 1 405
Filters 2 None
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 60
Incubation 2 0
LAG Phase 10
Measure 40
MeasurementType
Calibrate Factor
Factor 1616



GLICOSE

APRESENTAÇÃO

ReferênciaLaborLab: Glicose GOD
PAP Liquid Stable.

Código: 1770130

Apresentação: RA: 2 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

0 a 1 dia: 50 a 80 mg/dL
Neonatos: 40 a 60 mg/dL
Crianças: 60 a 100 mg/dL
Adulto: 74 a 106 mg/dL
Urina isolada: 1 a 15mg/dL
Urina 24horas: <0,5 g/24hs
LCR: Crianças 60 a 80 mg/dL
Adultos 40 a 70 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do
Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo
equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Glicose
Decimal 0
Measure Unit mg/dL
ReactionType End Point
Sample Volume 5ul
Reagent Volume R1 500 ul
Reagent Volume R2 0
ABS Range Min -100
ABS Range Max 300
LinearityLimit 500
Contaminating No
ReagentBlanking Yes
Differential No
Filters 1 510
Filters 2 None
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 300
Incubation 2 0
LAG Phase 2
Measure 1
MeasurementType
Calibrate Standard
Factor 0



LACTATO

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Lactate

Código: 1770200

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 4,5 a 19,8 mg/dL

Linearidade: 130 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Lactato
 Decimal 1
 Measure Unit mg/dL
 ReactionType End Point
 Sample Volume 4ul
 Reagent Volume R1 300 ul
 Reagent Volume R2 60ul
 ABS Range Min -100
 ABS Range Max 500
 LinearityLimit 130
 Contaminating No
 ReagentBlanking Yes
 Differential No
 Filters 1 546
 Filters 2 700
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0
 Incubation 1 5
 Incubation 2 300
 LAG Phase 2
 Measure 8
MeasurementType
 Calibrate Standard
 Factor 0



TGO (AST)

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

ReferênciaLaborLab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L
H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name	<u>TGO</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>45ul</u>
Reagent Volume R1	<u>450 ul</u>
Reagent Volume R2	<u>0 ul</u>
ABS Range Min	<u>900</u>
ABS Range Max	<u>2000</u>
LinearityLimit	<u>600</u>
Contaminating	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times	
Time Mix 1 (sec)	<u>0</u>
Time Mix 2 (sec)	<u>0</u>
Incubation 1	<u>60</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>30</u>
Measure	<u>50</u>
MeasurementType	
Calibrate	<u>Factor</u>
Factor	<u>1746</u>



TGP (ALT)

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

ReferênciaLaborLab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L
H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name	<u>TGP</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>45ul</u>
Reagent Volume R1	<u>450 ul</u>
Reagent Volume R2	<u>0 ul</u>
ABS Range Min	<u>900</u>
ABS Range Max	<u>2000</u>
LinearityLimit	<u>600</u>
Contaminating	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times	
Time Mix 1 (sec)	<u>0</u>
Time Mix 2 (sec)	<u>0</u>
Incubation 1	<u>60</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>30</u>
Measure	<u>50</u>
MeasurementType	
Calibrate	<u>Factor</u>
Factor	<u>1746</u>



HDL COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: HDL
Colesterol Direto.

Código: 1770160

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Próprio do Kit

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Baixo: < 40 mg/dL
Elevado (desejado): 60 mg/dL

Linearidade: 200 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name HDL Colesterol
Decimal 1
Measure Unit mg/dL
ReactionType End Point
Sample Volume 3ul
Reagent Volume R1 300 ul
Reagent Volume R2 100 ul
ABS Range Min -100
ABS Range Max 400
LinearityLimit 200
Contaminating No
ReagentBlanking No
Differential Yes
Filters 1 620
Filters 2 None
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 300
Incubation 2 280
LAG Phase 2
Measure 1
MeasurementType
Calibrate Standard
Factor 0



LDH

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: LDH-P
LiquidStable

Código: 1770210

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

Linearidade: 1000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name LDH
 Decimal 0
 Measure Unit U/L
 ReactionType Kinetic
 Sample Volume 10ul
 Reagent Volume R1 400 ul
 Reagent Volume R2 100 ul
 ABS Range Min 900
 ABS Range Max 2000
 LinearityLimit 1000
 Contaminating No
 ReagentBlanking No
 Differential No
 Filters 1 340
 Filters 2 None
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0,30
 Incubation 1 5
 Incubation 2 20
 LAG Phase 2
 Measure 50
MeasurementType
 Calibrate Factor
 Factor 8095



MAGNÉSIO

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Magnesium

Código: 1770220

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Magnesium
 Decimal 2
 Measure Unit mg/dL
 ReactionType End Point
 Sample Volume 5ul
 Reagent Volume R1 500 ul
 Reagent Volume R2 0
 ABS Range Min -300
 ABS Range Max 800
 LinearityLimit 6,0
 Contaminating No
 ReagentBlanking Yes
 Differential No
 Filters 1 510
 Filters 2 None
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0
 Incubation 1 160
 Incubation 2 0
 LAG Phase 2
 Measure 1
MeasurementType
 Calibrate Standard
 Factor 0



PCR

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: CRP

Código: 1770240

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

ImmunologyControlLevel 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name	<u>PCR</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>20ul</u>
Reagent Volume R1	<u>250 ul</u>
Reagent Volume R2	<u>50ul</u>
ABS Range Min	<u>-100</u>
ABS Range Max	<u>1000</u>
LinearityLimit	<u>20</u>
Contaminating	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times	
Time Mix 1 (sec)	<u>2</u>
Time Mix 2 (sec)	<u>2</u>
Incubation 1	<u>5</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>40</u>
Measure	<u>300</u>
MeasurementType	
Calibrate	<u>Standard</u>
Factor	<u>0</u>



PCR ULTRASENSÍVEL

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: HS PCR

Código: 1770170

Apresentação: RA: 1 x 20 mL
RB: 1 X 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Necessário realizar pré diluição 1:4 das amostras.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set
Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

ImmunologyControlLevel 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name	<u>PCR HS</u>
Decimal	<u>2</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>TempoFixo</u>
Sample Volume	<u>3ul</u>
Reagent Volume R1	<u>190 ul</u>
Reagent Volume R2	<u>190ul</u>
ABS Range Min	<u>-100</u>
ABS Range Max	<u>1000</u>
LinearityLimit	<u>20</u>
Contaminating	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>578</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times	
Time Mix 1 (sec)	<u>2</u>
Time Mix 2 (sec)	<u>2</u>
Incubation 1	<u>5</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>40</u>
Measure	<u>300</u>
MeasurementType	
Calibrate	<u>Standard</u>
Factor	<u>0</u>



PROTEÍNA TOTAL

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Protal

Código: 1770260

Apresentação: RA: 1 x 250 m

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name Prot. T.
 Decimal 1
 Measure Unit g/dL
 ReactionType End Point
 Sample Volume 7ul
 Reagent Volume R1 500 ul
 Reagent Volume R2 0
 ABS Range Min -100
 ABS Range Max 300
 LinearityLimit 17
 Contaminating No
 ReagentBlanking Yes
 Differential No
 Filters 1 535
 Filters 2 None
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0
 Incubation 1 240
 Incubation 2 0
 LAG Phase 2
 Measure 1
MeasurementType
 Calibrate Standard
 Factor 0



PROTEÍNA URINÁRIA

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Prot U/LCR

Código: 1770350

Apresentação: RA: 4 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Urina ou LCR.

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 1 a 15 mg/dL

U. 24 horas: 28 a 141 mg/24 horas

Linearidade: 300 mg/dL

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Prot. U.
 Decimal 1
 Measure Unit mg/dL
 ReactionType End Point
 Sample Volume 8ul
 Reagent Volume R1 400 ul
 Reagent Volume R2 0
 ABS Range Min 0
 ABS Range Max 400
 LinearityLimit 300
 Contaminating No
 ReagentBlanking Yes
 Differential No
 Filters 1 620
 Filters 2 None
Times
 Time Mix 1 (sec) 0
 Time Mix 2 (sec) 0
 Incubation 1 300
 Incubation 2 0
 LAG Phase 3
 Measure 1
MeasurementType
 Calibrate Standard
 Factor 0



TRIGLICÉRIDES

APRESENTAÇÃO

ReferênciaLaborLab: Triglicérides
GOD PAP Líquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: <150 mg/dL
Limiar alto: 150-199 mg/dL
Elevado: 200-499 mg/dL
Muito elevado: > 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Test Name Triglicerides
Decimal 0
Measure Unit mg/dL
ReactionType End Point
Sample Volume 5ul
Reagent Volume R1 500 ul
Reagent Volume R2 0
ABS Range Min 0
ABS Range Max 300
LinearityLimit 1000
Contaminating No
ReagentBlanking Yes
Differential No
Filters 1 510
Filters 2 None
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 360
Incubation 2 0
LAG Phase 2
Measure 1
MeasurementType
Calibrate Standard
Factor 0



URÉIA

AIRONE 200®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Uréia
UVLiquidStable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 a 43 mg/dL
Urina: 26 a 43 g/24hs

Linearidade:

300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Test Name Ureia
Decimal 0
Measure Unit mg/dL
ReactionType Kinetic
Sample Volume 4ul
Reagent Volume R1 320 ul
Reagent Volume R2 80ul
ABS Range Min 1000
ABS Range Max 2500
LinearityLimit 300
Contaminating No
ReagentBlanking Yes
Differential No
Filters 1 340
Filters 2 None
Times
Time Mix 1 (sec) 0
Time Mix 2 (sec) 0
Incubation 1 20
Incubation 2 60
LAG Phase 3
Measure 60
MeasurementType
Calibrate Standard
Factor 0