



Protocolos sugeridos Bravo forte®



Assessoria LaborLab.

Versão 2.6.20



Índice

Acido Urico	2.
Albumina	3.
Amilase	4.
Bilirrubina Direta	5.
Bilirrubina Total.....	6.
Calcio Arsenazo	7.
CKMB	8.
CPK.....	9.
Colesterol	10.
Creatinina	11.
Ferro	12.
Fosfatase Alcalina	13.
Fosforo.....	14.
Gama GT.....	15.
Glicose	16.
Lactato	17.
TGO (AST)	18.
TGP (ALT).....	19.
HDL Colesterol	20.
LDH.....	21.
Magnésio	22.
PCR.....	23.
PCR Ultrasensível.....	24.
Proteína Total.....	25.
Proteína Total Urinária	26.
Triglicérides	27.
Uréia	28.



ÁCIDO URICO

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Uric Acid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 2,5 a 6,0 mg/dL
M: 2,6 a 5,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 2

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 546 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 5 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: -

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 20 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	2,5	6,0
<u>WOMAN</u>	2,6	5,0
<u>CHILD</u>	-	-



ALBUMINA

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: ALBUMIN

Código: 1770010

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (g/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: g/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 2

NEEDLE WASHING: 3

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 630 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: -

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 150

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 7 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	2,5	4,8
<u>WOMAN</u>	2,6	4,8
<u>CHILD</u>	-	-



AMILASE

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Amylase

Código: 1770020

Apresentação: RA: 2 x 30 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (U/L)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TYPE: Kinetic

ZERO: Water

UNIT: U/L

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 2

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 405 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 7 µL

REAGENT1 V: 250 µL

REAGENT2 V: -

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 60

READING TIME: 90

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 125 U/L

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0	125
<u>WOMAN</u>	0	125
<u>CHILD</u>	-	-



BILIRRUBINA DIRETA

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Bilirubin D

Código: 1770030

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: até 0,4 mg/dL

Linearidade:

12 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TYPE: Blank Dif A

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 2

NEEDLE WASHING: 3

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 546 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 24 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: 60 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 60

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 12 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0,0	0,4
<u>WOMAN</u>	0,0	0,4
<u>CHILD</u>	-	-



BILIRUBINA TOTAL

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Bilirubin T

Código: 1770040

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL
Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL
Até 48hs: 3,4 a 11,5 mg/dL
Do 3° a 5° dia: 1,5 a 12,0 mg/dL
Adultos: até 1,0 mg/dL

Linearidade: 30 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

TYPE: Blank Dif A

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 2

NEEDLE WASHING: 3

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 546 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 30 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

SAMPLE V: 9 µL

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: 60 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 60

REAGENT 3 DELAY: -

CATEGORIES MIN. MAX.

MAN 0,0 1,0

WOMAN 0,0 1,0

CHILD - -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL



CÁLCIO ARSENAZO

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Cálcio Arsenazo

Código: 1770050

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL

Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 1

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 630 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 5 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: -

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 240

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 20 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	8,5	10,5
<u>WOMAN</u>	8,5	10,5
<u>CHILD</u>	-	-



CK MB

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: CK MB

Código: 1770060

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

Controle do Kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (U/L)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

TYPE: Kinetic

ZERO: Water

UNIT: U/L

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: -

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 340 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 12 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: 60 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 0

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION
SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: 300

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 500 U/L

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0	25
<u>WOMAN</u>	0	25
<u>CHILD</u>	-	-



CPK

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: CK Nac

Código: 1770070

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: H até 195 U/L

M até 170 U/L

Linearidade: 1800 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (U/L)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

TYPE: Kinetic

ZERO: Water

UNIT: U/L

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: -

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 340 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 5 µL

REAGENT1 V: 250 µL

REAGENT2 V: 50 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 0

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION
SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 180

READING TIME: 98

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 1800 U/L

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0	195
<u>WOMAN</u>	0	170
<u>CHILD</u>	-	-



COLESTEROL

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Colesterol
COD-PAD Liquid Stable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: < 200 mg/dL

Limiar elevado: 200-239 mg/dL

Elevado: 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 505 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: -

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 500 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0	200
<u>WOMAN</u>	0	200
<u>CHILD</u>	-	-



CREATININA

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Creatinine

Código: 1770100

Apresentação: RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto Homem : 0,70 a 1,20 mg/dL

Adulto Mulher: 0,53 a 1,00 mg/dL

Linearidade: 9,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: Kinetic

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 2

NEEDLE WASHING: 4

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 505 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 5 µL

REAGENT1 V: 240 µL

REAGENT2 V: 60µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 60

READING TIME: 90

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0,70	1,20
<u>WOMAN</u>	0,53	1,00
<u>CHILD</u>	-	-



FERRO

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Iron

Código: 1770180

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: M 60 – 170 ug/dL

H 65 – 175 ug/dL

Linearidade: 1000 ug/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (ug/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TYPE: Kinetic

ZERO: Blank

UNIT: µg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 2

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 600 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 60 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: 60 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 1000 µg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

	<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>REAGENT3 V:</u> -	<u>MAN</u>	65	175
<u>REAGENT2 DELAY:</u> -	<u>WOMAN</u>	60	170
<u>REAGENT 3 DELAY:</u> -	<u>CHILD</u>	-	-



FOSFATASE ALCALINA

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Alkaline Phosphatase

Código: 1770110

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L

Adultos: 65 a 300 U/L

Linearidade: 1500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (U/L)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TYPE: Kinetic

ZERO: Water

UNIT: U/L

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 405 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: 75 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 60

READING TIME: 98

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 1500 U/L

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	65	300
<u>WOMAN</u>	65	300
<u>CHILD</u>	0	645



FOSFORO

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Phosphorus

Código: 1770250

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: -

DECIMAL: 1

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 340 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 5 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: -

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 200

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 16 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	2,5	5,6
<u>WOMAN</u>	2,5	5,6
<u>CHILD</u>	4,0	7,0



GAMA GT

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Gama
Glutamil Transferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L

H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do
Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (U/L)

@ Paramento será calculado pelo
equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: Kinetic

ZERO: Water

UNIT: U/L

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: -

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 405 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: 75 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 60

READING TIME: 98

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 1200 U/L

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	11	50
<u>WOMAN</u>	7	32
<u>CHILD</u>	-	-



GLICOSE

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Glicose
GOD PAP Liquid Stable.

Código: 1770130

Apresentação: RA: 2 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

0 a 1 dia:	50 a 80 mg/dL
Neonatos:	40 a 60 mg/dL
Crianças:	60 a 100 mg/dL
Adulto:	74 a 106 mg/dL
Urina isolada:	1 a 15mg/dL
Urina 24horas:	<0,5 g/24hs
LCR:	Crianças 60 a 80 mg/dL
	Adultos 40 a 70 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 505 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: -

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 500 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

	<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>REAGENT2 V:</u> -	<u>MAN</u>	74	106
<u>REAGENT3 V:</u> -	<u>WOMAN</u>	74	106
<u>REAGENT2 DELAY:</u> -	<u>CHILD</u>	60	100
<u>REAGENT 3 DELAY:</u> -			



LACTATO

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Lactate

Código: 1770200

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 4,5 a 19,8 mg/dL

Linearidade: 130 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 1

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 546 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: 50

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 120

READING TIME: 300

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 130 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	4,5	19,8
<u>WOMAN</u>	4,5	19,8
<u>CHILD</u>	-	-



TGO (AST)

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L

H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (U/L)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: Kinetic

ZERO: Water

UNIT: U/L

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: -

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 340 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 25 µL

REAGENT1 V: 200 µL

REAGENT2 V: 50

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 60

READING TIME: 98

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 600 U/L

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0	38
<u>WOMAN</u>	0	32
<u>CHILD</u>	-	-



TGP (ALT)

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L

H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (U/L)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: Kinetic

ZERO: Water

UNIT: U/L

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: -

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 340 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 25 µL

REAGENT1 V: 200 µL

REAGENT2 V: 50

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 60

READING TIME: 98

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 600 U/L

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0	41
<u>WOMAN</u>	0	31
<u>CHILD</u>	-	-



HDL COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: HDL
Colesterol Direto.

Código: 1770160

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Próprio do Kit

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Baixo: < 40 mg/dL
Elevado (desejado): 60 mg/dL

Linearidade: 200 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 505 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 250 µL

REAGENT2 V: 90 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 300

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 200 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

	<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>REAGENT3 V:</u> -	<u>MAN</u>	40	60
<u>REAGENT2 DELAY:</u> 300	<u>WOMAN</u>	40	60
<u>REAGENT 3 DELAY:</u> -	<u>CHILD</u>	-	-



LDH

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: LDH-P
Liquid Stable

Código: 1770210

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

Linearidade: 1000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (U/L)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: Kinetic

INCUBATION TIME: 30

ZERO: Water

READING TIME: 180

UNIT: U/L

CHECK BLANK DRIFT: -

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: -

MAX. REAGENT ABS: -

DECIMAL: -

MIN. REAGENT ABS: -

NEEDLE WASHING: 2

MAX. CONC.: 1000 U/L

CUVETTE WASHING: Double

MIN. CONC.: -

WASHING MODE: Fast

MAX. ABS: -

WAVELENGTH: 340 / 700

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

CALIBRATION: Standard

MIN. DELTA ABS: -

CALIBRATOR: #

MAX. ABS DEPL.: -

VALUE: **

MIN. ABS DEPL.: -

REPEAT Nº: 1

FLUCT. RATE: -

SAMPLE V: 5 µL

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

REAGENT1 V: 250 µL

REAGENT2 V: 63

CATEGORIES MIN. MAX.

REAGENT3 V: -

MAN 230 460

REAGENT2 DELAY: -

WOMAN 230 460

REAGENT 3 DELAY: -

CHILD - -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL



MAGNÉSIO

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Magnesium

Código: 1770220

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 1

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 505 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V:

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY:

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 6,0 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

	<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>REAGENT2 V:</u>	<u>MAN</u>	1,7	2,5
<u>REAGENT3 V:</u> -	<u>WOMAN</u>	1,7	2,5
<u>REAGENT2 DELAY:</u>	<u>CHILD</u>	-	-
<u>REAGENT 3 DELAY:</u> -			



PCR

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: CRP

Código: 1770240

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set
Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade:

20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 2

NEEDLE WASHING: 3

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 340 / 700

CALIBRATION: Multical

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 30 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: 60 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 300

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 20 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0,0	0,5
<u>WOMAN</u>	0,0	0,5
<u>CHILD</u>	-	-



PCR ULTRASENSÍVEL

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: HS PCR

Código: 1770170

Apresentação: RA: 1 x 20 mL
RB: 1 X 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Necessário realizar pré diluição 1:4 das amostras.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: Fixed Time

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 2

NEEDLE WASHING: 3

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 546 / 700

CALIBRATION: Multical

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 7 µL

REAGENT1 V: 150 µL

REAGENT2 V: 150 µL

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 180

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 180

READING TIME: 20

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 20 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0,0	0,5
<u>WOMAN</u>	0,0	0,5
<u>CHILD</u>	-	-



PROTEÍNA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Protal

Código: 1770260

Apresentação: RA: 1 x 250 m

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 g/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: g/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: 1

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 546 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 5 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V:

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 300

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 17 g/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>REAGENT2 V:</u>	<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>REAGENT3 V:</u> -	<u>MAN</u>	6,1	7,9
<u>REAGENT2 DELAY:</u> 300	<u>WOMAN</u>	6,1	7,9
<u>REAGENT 3 DELAY:</u> -	<u>CHILD</u>	-	-



PROTEÍNA URINÁRIA

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Prot U/LCR

Código:

Apresentação: RA: 4 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Urina ou LCR.

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 15 mg/dL

U. 24 horas: 30 a 140 mg/24 horas

Linearidade: 300 mg/dL

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 600 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 6 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V:

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 300

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 150 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>REAGENT2 V:</u>	<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>REAGENT3 V:</u> -	<u>MAN</u>	-	25
<u>REAGENT2 DELAY:</u> 300	<u>WOMAN</u>	-	25
<u>REAGENT 3 DELAY:</u> -	<u>CHILD</u>	-	-



TRIGLICÉRIDES

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Triglicérides
GOD PAP Liquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: <150 mg/dL

Limiar alto: 150-199 mg/dL

Elevado : 200-499 mg/dL

Muito elevado: > 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: End Point

ZERO: Blank

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: 2

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 505 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: -

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: -

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 300

READING TIME: -

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 500 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	0	150
<u>WOMAN</u>	0	150
<u>CHILD</u>	-	-



URÉIA

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Uréia UV
Liquid Stable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 a 43 mg/dL
Urina: 26 a 43 g/24hs

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Bravo forte®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

TYPE: Kinetic

ZERO: Water

UNIT: mg/dL

TEMPERATURE: 37°C

FILLING REAGENT: -

DECIMAL: -

NEEDLE WASHING: 2

CUVETTE WASHING: Double

WASHING MODE: Fast

WAVELENGTH: 340 / 700

CALIBRATION: Standard

CALIBRATOR: #

VALUE: **

REPEAT Nº: 1

SAMPLE V: 3 µL

REAGENT1 V: 300 µL

REAGENT2 V: 75

REAGENT3 V: -

REAGENT2 DELAY: 30

REAGENT 3 DELAY: -

DILUTION

SAMPLE: 50 µL

DILUENT: 150 µL

INCUBATION TIME: 60

READING TIME: 120

CHECK BLANK DRIFT: -

MAX. REAGENT ABS: -

MIN. REAGENT ABS: -

MAX. CONC.: 300 mg/dL

MIN. CONC.: -

MAX. ABS: -

MIN. ABS: -

MAX. DELTA ABS: -

MIN. DELTA ABS: -

MAX. ABS DEPL.: -

MIN. ABS DEPL.: -

FLUCT. RATE: -

QUALITY: STD_MEDIU STD2_HIGH

<u>CATEGORIES</u>	<u>MIN.</u>	<u>MAX.</u>
<u>MAN</u>	13	43
<u>WOMAN</u>	13	43
<u>CHILD</u>	-	-