



Protocolos sugeridos Vitalab Eclipse Plus[®]



Os protocolos aqui descritos, devem ser validados com os ensaios correspondentes e seu desempenho deverá ser verificado com uma adequada planificação e execução sistemática do controle de qualidade.

Assessoria Científica Laborlab

Revisão 1.6.20



Índice

Acido Urico	2.
Albumina	3.
Amilase	4.
Bilirrubina Direta	5.
Bilirrubina Total.....	6.
Calcio Arsenazo	7.
CKMB	8.
CPK.....	9.
Colesterol	10.
Creatinina	11.
Ferro	12.
Fosfatase Alcalina	13.
Fosforo.....	14.
Gama GT.....	15.
Glicose	16.
Lactato	17.
TGO (AST)	18.
TGP (ALT)	19.
HDL Colesterol	20.
LDH.....	21.
Magnésio	22.
PCR.....	23.
PCR Ultrasensível.....	24.
Proteína Total.....	25.
Proteína Total Urinária	26.
Triglicérides	27.
Uréia	28.



ÁCIDO ÚRICO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Uric Acid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos - H: 3,5 a 7,2 mg/dL

M: 2,6 a 6,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name:	<u>Ac. Urico</u>
Modo	<u>Ponto Final</u>
Filter	<u>505</u>
Temp	<u>37</u>
Units	<u>mg/dL</u>
R-Blank	<u>yes</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>0.300</u>
Cal Name	<u>#</u>
Nr	<u>1</u>
Conc	<u>#</u>
Rep	<u>1</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>2.300</u>
Factor	<u>N.A.</u>
S-Blank	<u>No</u>
Delay	<u>4</u>
Means	<u>2</u>
Inc. time	<u>600</u>
S-volume	<u>10</u>
R-Volume	<u>500</u>
System	<u>flowcell</u>
Volume	<u>450</u>
Test rep.	<u>1</u>
Ref Low	<u>3,5</u>
Ref High	<u>7,2</u>



ALBUMINA

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: ALBUMIN

Código: 1770010

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (g/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Name:	<u>Albumina</u>
Modo	<u>Ponto Final</u>
Filter	<u>620</u>
Temp	<u>37</u>
Units	<u>g/dL</u>
R-Blank	<u>yes</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>2.300</u>
Cal Name	<u>#</u>
Nr	<u>1</u>
Conc	<u>#</u>
Rep	<u>1</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>2.300</u>
Factor	<u>N.A.</u>
S-Blank	<u>No</u>
Delay	<u>10</u>
Means	<u>2</u>
Inc. time	<u>120</u>
S-volume	<u>5</u>
R-Volume	<u>500</u>
System	<u>flowcell</u>
Volume	<u>450</u>
Test rep.	<u>1</u>
Ref Low	<u>3,5</u>
Ref High	<u>4,8</u>
L-ABS	<u>0.000</u>

**AMILASE****APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Amylase**Código:** 1770020**Apresentação:** RA: 2 x 30 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma heparinizado ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Amylase
Modo Cinetic
Filter 405
Temp 37
Units U/L
R-Blank NO
L-ABS N.A.
H-ABS N.A.
Cal Name #
Nr 1
Conc #
Rep 1
L-ABS 0.000
H-ABS 2.300
Factor N.A.
S-Blank No
Delay 15
Means 30
Inc. time 60
S-volume 10
R-Volume 400
System flowcell
Volume 450
Test rep. 1
Ref Low 0
Ref High 125

**BILIRRUBINA DIRETA****APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Bilirubin D**Código:** 1770030**Apresentação:** RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: até 0,2 mg/dL

Linearidade: 12 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®*O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários*

Name: Bili Direta
Modo Ponto Final
Filter 550
Temp 37
Units mg/dL
R-Blank NO
L-ABS 0.000
H-ABS 0.300
Cal Name #
Nr 1
Conc #
Rep 1
L-ABS 0.000
H-ABS 2.300
Factor N.A.
S-Blank Yes
Delay 4
Means 2
Inc. time 500
S-volume 5
R-Volume 500
System flowcell
Volume 500
Test rep. 1
Ref Low 0,0
Ref High 0,2



BILIRRUBINA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Bilirubin T

Código: 1770040

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL
Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL
Até 48hs: 3,4 a 11,5 mg/dL
Do 3° a 5° dia: 1,5 a 12,0 mg/dL
Adultos: até 1,0 mg/dL

Linearidade: 30 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Bili Total
 Modo Ponto Final
 Filter 550
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank NO
 L-ABS 0.000
 H-ABS 0.300
 Cal Name #
 Nr 1
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank Yes
 Delay 4
 Means 2
 Inc. time 500
 S-volume 5
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 0,0
 Ref High 1,0



CÁLCIO ARSENAZO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Cálcio
Arsenazo

Código: 1770050

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma heparinizado ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL

Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Calcio
 Modo Ponto Final
 Filter 620
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank yes
 L-ABS 0.000
 H-ABS 1.000
 Cal Name #
 Nr 1
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank No
 Delay 4
 Means 2
 Inc. time 120
 S-volume 5
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 8,5
 Ref High 10,5



CK MB

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: CK MB

Código: 1770060

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Controle do kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Name:	<u>CKMB</u>
Modo	<u>Cinetic</u>
Filter	<u>340</u>
Temp	<u>37</u>
Units	<u>U/L</u>
R-Blank	<u>NO</u>
L-ABS	<u>N.A.</u>
H-ABS	<u>N.A.</u>
Cal Name	<u>None</u>
Nr	<u>N.A.</u>
Conc	<u>N.A.</u>
Rep	<u>N.A.</u>
L-ABS	<u>N.A.</u>
H-ABS	<u>N.A.</u>
Factor	<u>8254</u>
S-Blank	<u>No</u>
Delay	<u>600</u>
Means	<u>N.A.</u>
Inc. time	<u>300</u>
S-volume	<u>20</u>
R-Volume	<u>500</u>
System	<u>flowcell</u>
Volume	<u>500</u>
Test rep.	<u>1</u>
Ref Low	<u>0</u>
Ref High	<u>25</u>



CPK

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: CK Nac

Código: 1770070

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: H até 195 U/L

M até 170 U/L

Linearidade: 1800 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: CK
 Modo Cinetic
 Filter 340
 Temp 37
 Units U/L
 R-Blank NO
 L-ABS N.A.
 H-ABS N.A.
 Cal Name None
 Nr N.A.
 Conc N.A.
 Rep N.A.
 L-ABS N.A.
 H-ABS N.A.
 Factor 4127
 S-Blank No
 Delay 300
 Means N.A.
 Inc. time 60
 S-volume 5
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 0
 Ref High 195



COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Colesterol
COD-PAD Liquid Stable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Ótimo: < 200 mg/dL

Moderadamente alto: 200-239 mg/dL

Elevado: ≥ 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name:	<u>Colesterol</u>
Modo	<u>Ponto Final</u>
Filter	<u>505</u>
Temp	<u>37</u>
Units	<u>mg/dL</u>
R-Blank	<u>yes</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>0.300</u>
Cal Name	<u>#</u>
Nr	<u>1</u>
Conc	<u>#</u>
Rep	<u>1</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>2.300</u>
Factor	<u>N.A.</u>
S-Blank	<u>No</u>
Delay	<u>4</u>
Means	<u>2</u>
Inc. time	<u>300</u>
S-volume	<u>5</u>
R-Volume	<u>500</u>
System	<u>flowcell</u>
Volume	<u>500</u>
Test rep.	<u>1</u>
Ref Low	<u>0</u>
Ref High	<u>200</u>



CREATININA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Creatinine

Código: 1770100

Apresentação: RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 0,7 a 1,3 mg/dL

M: 0,6 a 1,1 mg/dL

Linearidade: 9,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Creatinina
 Modo Two Point
 Filter 505
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank yes
 L-ABS 0.000
 H-ABS 0.300
 Cal Name #
 Nr 1
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank No
 Delay 12
 Means 60
 Inc. time 30
 S-volume 100
 R-Volume 600
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 0,7
 Ref High 1,3

**FERRO****VITALAB ECLIPSE PLUS®***O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários***APRESENTAÇÃO****Referência Laborlab:** Iron**Código:** 1770180**Apresentação:** RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL**NOTAS****Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M 50 – 170 µg/dL

H 65 – 175 µg/dL

Linearidade: 1500 µg/dL**Legenda:**

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (µg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

Name: Ferro
Modo End Point
Filter 600
Temp 37
Units mg/dL
R-Blank yes
L-ABS 0.000
H-ABS 0.300
Cal Name #
Nr 1
Conc #
Rep 1
L-ABS 0.000
H-ABS 2.300
Factor N.A.
S-Blank No
Delay 4
Means 2
Inc. time 300
S-volume 80
R-Volume 500
System flowcell
Volume 500
Test rep. 1
Ref Low 50
Ref High 170



FOSFATASE ALCALINA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Alkaline Phosphatase

Código: 1770110

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L
Adultos: 65 a 300 U/L

Linearidade: 1500 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: FAL
 Modo Cinetic
 Filter 405
 Temp 37
 Units U/L
 R-Blank NO
 L-ABS N.A.
 H-ABS N.A.
 Cal Name None
 Nr N.A.
 Conc N.A.
 Rep N.A.
 L-ABS N.A.
 H-ABS N.A.
 Factor 6812
 S-Blank No
 Delay 120
 Means N.A.
 Inc. time 60
 S-volume 5
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 0
 Ref High 645



FÓSFORO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Phosphorus

Código: 1770250

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Fosforo
 Modo Ponto Final
 Filter 340
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank yes
 L-ABS 0.000
 H-ABS 1.000
 Cal Name #
 Nr 1
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank No
 Delay 4
 Means 2
 Inc. time 600
 S-volume 5
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 2,5
 Ref High 7,0

**GAMA GT****APRESENTAÇÃO**

Referência Laborlab: Gama
Glutamil Transferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L
H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: GGT
Modo Cinetic
Filter 405
Temp 37
Units U/L
R-Blank NO
L-ABS N.A.
H-ABS N.A.
Cal Name None
Nr N.A.
Conc N.A.
Rep N.A.
L-ABS N.A.
H-ABS N.A.
Factor 1158
S-Blank No
Delay 20
Means N.A.
Inc. time 60
S-volume 5
R-Volume 500
System flowcell
Volume 500
Test rep. 1
Ref Low 7
Ref High 32



GLICOSE

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Glicose GOD
PAP Liquid Stable.

Código: 1770130

Apresentação: RA: 2 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma, urina ou líquido
cefalorraquidiano (LCR).

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

0 a 1 dia: 50 a 80 mg/dL
Neonatos: 40 a 60 mg/dL
Crianças: 60 a 100 mg/dL
Adulto: 74 a 106 mg/dL
Urina isolada: 1 a 15mg/dL
Urina 24horas: <0,5 g/24hs
LCR: Crianças 60 a 80 mg/dL
Adultos 40 a 70 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do
laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo
equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Glicose
Modo Ponto Final
Filter 505
Temp 37
Units mg/dL
R-Blank yes
L-ABS 0.000
H-ABS 0.300
Cal Name #
Nr 1
Conc #
Rep 1
L-ABS 0.000
H-ABS 2.300
Factor N.A.
S-Blank No
Delay 4
Means 2
Inc. time 300
S-volume 5
R-Volume 500
System flowcell
Volume 500
Test rep. 1
Ref Low 0
Ref High 200



LACTATO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Lactate

Código: 1770200

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Plasma ou líquido cefalorraquidiano (LCR).

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue venoso: 4,5 a 19,8 mg/dL

Sangue arterial: < 11,3 mg/dL

LCR adulto: 10 a 25 mg/dL

Linearidade: 130 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Lactato
Modo Ponto Final
Filter 550
Temp 37
Units mg/dL
R-Blank NO
L-ABS 0.000
H-ABS 0.300
Cal Name #
Nr 1
Conc #
Rep 1
L-ABS 0.000
H-ABS 2.300
Factor N.A.
S-Blank Yes
Delay 4
Means 2
Inc. time 500
S-volume 5
R-Volume 500
System flowcell
Volume 500
Test rep. 1
Ref Low 4,5
Ref High 19,8



TGO (AST)

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L
H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: TGO
 Modo Cinetic
 Filter 340
 Temp 37
 Units U/L
 R-Blank NO
 L-ABS N.A.
 H-ABS N.A.
 Cal Name None
 Nr N.A.
 Conc N.A.
 Rep N.A.
 L-ABS N.A.
 H-ABS N.A.
 Factor 1746
 S-Blank No
 Delay 90
 Means N.A.
 Inc. time 60
 S-volume 5
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 0
 Ref High 38



TGP (ALT)

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L
H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: TGP
 Modo Cinetic
 Filter 340
 Temp 37
 Units U/L
 R-Blank NO
 L-ABS N.A.
 H-ABS N.A.
 Cal Name None
 Nr N.A.
 Conc N.A.
 Rep N.A.
 L-ABS N.A.
 H-ABS N.A.
 Factor 1746
 S-Blank No
 Delay 90
 Means N.A.
 Inc. time 60
 S-volume 5
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 0
 Ref High 41



HDL COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: HDL
Colesterol Direto.

Código: 1770160

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.
RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Próprio do kit

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Homens: 30 – 70mg/dL
Mulheres: 30 – 85mg/dL

Linearidade: 200 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: HDL
 Modo Ponto Final
 Filter 600
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank NO
 L-ABS 0.000
 H-ABS 0.300
 Cal Name #
 Nr 1
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank Yes
 Delay 300
 Means 2
 Inc. time 300
 S-volume 5
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 30
 Ref High 70

**LDH****APRESENTAÇÃO**

Referência Laborlab: LDH-P Liquid Stable

Código: 1770210

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

Linearidade: 1000 U/L

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (U/L)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: LDH
Modo Cinetic
Filter 340
Temp 37
Units U/L
R-Blank NO
L-ABS N.A.
H-ABS N.A.
Cal Name None
Nr N.A.
Conc N.A.
Rep N.A.
L-ABS N.A.
H-ABS N.A.
Factor 8095
S-Blank No
Delay 90
Means N.A.
Inc. time 60
S-volume 10
R-Volume 500
System flowcell
Volume 500
Test rep. 1
Ref Low 230
Ref High 460



MAGNÉSIO

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Magnesium

Código: 1770220

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma heparinizado ou urina

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs: 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do alibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Magnesio
 Modo Ponto Final
 Filter 505
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank yes
 L-ABS 0.000
 H-ABS 1.000
 Cal Name #
 Nr 1
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank No
 Delay 60
 Means 2
 Inc. time 300
 S-volume 5
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 1,7
 Ref High 2,5



PCR

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: CRP

Código: 1770240

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: PCR
 Modo Ponto Final
 Filter 340
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank NO
 L-ABS 0.000
 H-ABS 0.300
 Cal Name #
 Nr 6
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank Yes
 Delay 300
 Means 2
 Inc. time 300
 S-volume 40
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 0,0
 Ref High 0,5



PCR ULTRASENSÍVEL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: HS PCR

Código: 1770170

Apresentação: RA: 1 x 20 mL
RB: 1 X 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Necessário realizar pré diluição 1:4 das amostras.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: PCR HS
 Modo Two Point
 Filter 570
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank NO
 L-ABS 0.000
 H-ABS 0.300
 Cal Name #
 Nr 6
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank Yes
 Delay 300
 Means 2
 Inc. time 200
 S-volume 12
 R-Volume 600
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 0,0
 Ref High 0,5



PROTEÍNA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Protal

Código: 1770260

Apresentação: RA: 1 x 250 m

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 g/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (g/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name:	<u>Proteína Total</u>
Modo	<u>Ponto Final</u>
Filter	<u>540</u>
Temp	<u>37</u>
Units	<u>g/dL</u>
R-Blank	<u>yes</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>2.300</u>
Cal Name	<u>#</u>
Nr	<u>1</u>
Conc	<u>#</u>
Rep	<u>1</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>2.300</u>
Factor	<u>N.A.</u>
S-Blank	<u>No</u>
Delay	<u>120</u>
Means	<u>2</u>
Inc. time	<u>300</u>
S-volume	<u>5</u>
R-Volume	<u>500</u>
System	<u>flowcell</u>
Volume	<u>500</u>
Test rep.	<u>1</u>
Ref Low	<u>6,1</u>
Ref High	<u>7,9</u>



PROTEÍNA URINÁRIA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Prot U/LCR

Código: 1770350

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Urina ou líquido cefalorraquidiano (LCR).

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 1 a 15 mg/dL

U. 24 horas: 28 a 141 mg/24 horas

Linearidade: 150 mg/dL

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Prot. Urinaria
 Modo Ponto Final
 Filter 620
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank yes
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Cal Name #
 Nr 1
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank No
 Delay 10
 Means 2
 Inc. time 600
 S-volume 10
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 1
 Ref High 15



TRIGLICÉRIDES

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Triglicérides
GOD PAP Líquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Ótimo: <150 mg/dL

Moderadamente elevado: 150-199 mg/dL

Elevado: 200-499 mg/dL

Muito elevado: ≥ 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name:	<u>Triglicerides</u>
Modo	<u>Ponto Final</u>
Filter	<u>505</u>
Temp	<u>37</u>
Units	<u>mg/dL</u>
R-Blank	<u>yes</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>0.300</u>
Cal Name	<u>#</u>
Nr	<u>1</u>
Conc	<u>#</u>
Rep	<u>1</u>
L-ABS	<u>0.000</u>
H-ABS	<u>2.300</u>
Factor	<u>N.A.</u>
S-Blank	<u>No</u>
Delay	<u>4</u>
Means	<u>2</u>
Inc. time	<u>300</u>
S-volume	<u>5</u>
R-Volume	<u>500</u>
System	<u>flowcell</u>
Volume	<u>500</u>
Test rep.	<u>1</u>
Ref Low	<u>0</u>
Ref High	<u>150</u>



URÉIA

APRESENTAÇÃO

Referência Laborlab: Uréia UV
Liquid Stable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para uso.

RB: Pronto para uso.

Instruções de Uso:

Vide instruções de uso do kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de vencimento.

Amostra:

Soro, plasma ou urina.

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 a 43 mg/dL

Urina: 26 a 43 g/24hs

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo critério do CQI do laboratório.

(**) Inserir o valor do calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

VITALAB ECLIPSE PLUS®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Name: Ureia
 Modo Two Point
 Filter 340
 Temp 37
 Units mg/dL
 R-Blank yes
 L-ABS 0.000
 H-ABS 0.300
 Cal Name #
 Nr 1
 Conc #
 Rep 1
 L-ABS 0.000
 H-ABS 2.300
 Factor N.A.
 S-Blank No
 Delay 15
 Means 60
 Inc. time 15
 S-volume 4
 R-Volume 500
 System flowcell
 Volume 500
 Test rep. 1
 Ref Low 13
 Ref High 43