

Para a limpeza em analisadores automáticos de coagulação

APLICAÇÕES

COR Cleanser é uma solução de limpeza para analisadores automáticos que realizam provas de coagulação.

REAGENTES FORNECIDOS

COR Cleanser: solução de hipoclorito de sódio 1%.

INSTRUÇÕES DE USO

Pronto para uso. Quando o analisador não estiver sendo utilizado, tampar a solução e manter sob temperatura ambiente protegido da luz.

PRECAUÇÕES

O Reagente é para uso diagnóstico "in vitro". Evitar a ingestão e contato com a pele. Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas. Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO COR

Cleanser: é estável à temperatura ambiente (2-30°C) até a data de vencimento indicada na embalagem. Não congelar.

APRESENTAÇÃO

- 3 x 100 mL (Cód. 1770760)

SÍMBOLOS

	Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Uso médico-diagnóstico "in vitro"
	Conteúdo suficiente para <n> testes
	Data de validade
	Limite de temperatura (conservar a)
	Não congelar
	Risco biológico
	Volume após da reconstituição
	Conteúdo
	Número de lote
	Elaborado por:
	Nocivo
	Corrosivo / Caústico
	Irritante
	Consultar as instruções de uso
	Calibrador
	Controle
	Controle Positivo
	Controle Negativo
	Número de catálogo

Termo de garantia

Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio deste kit, assim como em sua conservação.