



Protein Calibrator

Lote: xxxxxxxx Val.: xx/xx/xxxx

Finalidade

Para a calibração de métodos imunoturbidimétricos.

Aplicações

O **Protein Calibrator** foi desenvolvido para ser utilizado com os reagentes turbidimétricos da Laborlab. Consultar a tabela anexa para valores estabelecidos para os constituintes, visto os mesmos são lote específicos.

Reagentes fornecidos

Calibrador: soro inativo com conservantes apropriados.

Instruções de uso

Calibrador: pronto para uso.

Precauções

O reagente é para uso diagnóstico "in vitro".

Evitar a ingestão e contato com a pele.

O calibrador foi preparado partindo de material não reagente para HBsAg e HIV. No entanto, devem ser manipulados como se tratando de material infectante. Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação local vigente.

Estabilidade e instruções de armazenamento

Calibrador: estável sob refrigeração (2-10°C) até a data do vencimento indicada na embalagem. Não congelar.





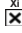

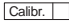
Uma vez aberta a embalagem é estável por 30 dias sob refrigeração (2-10°C). Não congelar.

Apresentação

- 1 x 1 ml (Cód. 1770620)

VALORES ESTABELECIDOS			
PROTEÍNA	MÉTODO	VALOR	
		(mg/dl)	(g/l)
α1-Glicoproteína	a1-Acid Glycoprotein (AGP)		
Componente C3	C3		
Componente C4	C4		
Imunoglobulina A	IgA		
Imunoglobulina G	IgG		
Imunoglobulina M	IgM		
Transferrina	Transferrin		

SÍMBOLOS

C	Este produto preenche os requisitos da Diretiva Européia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"
P	Representante autorizado na Comunidade Européia
V	Uso médico-diagnóstico "in vitro"
X	Conteúdo suficiente para <n> testes
H	Data de validade
I	Limite de temperatura (conservar a)
	Não congelar
F	Risco biológico
\longrightarrow	Volume após da reconstituição
	Conteúdo
g	Número de lote
M	Elaborado por:
	Nocivo
	Corrosivo / Caústico
	Irritante
	Consultar as instruções de uso
	Calibrador
b	Controle
b	Controle Positivo
c	Controle Negativo
h	Número de catálogo

Termo de garantia

Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio deste kit, assim como em sua conservação.



Produtos para Laboratórios Ltda.
Estrada do Capão Bonito, 489
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07263-010
CNPJ: 72.807.043/0001-94
Atendimento ao cliente:
+55 (11) 2480 0529/+55 (11) 2499 1277
sac@laborlab.com.br
www.laborlab.com.br